

whiteSKY Alveo Line & Tissue Line

Használati utasítások



whiteSKY T.L. sebészeti protokoll



Írányított előkészítés

Az implantátumágyp előkészítése a whiteSKY T.L. implantátumoknál úgyszintén irányítottan végezhető. Az implantátum behelyezése ezután szabad kézzel történik.

Implantátumhosszak

Crestal fúró


300 ford./perc

Kemény csont D1



300 ford./perc

Közepesen kemény / puha csont D2-D4

300 ford./perc

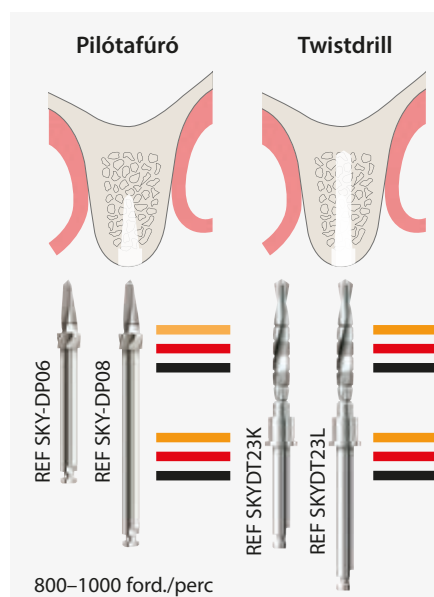

TISSUE LINE

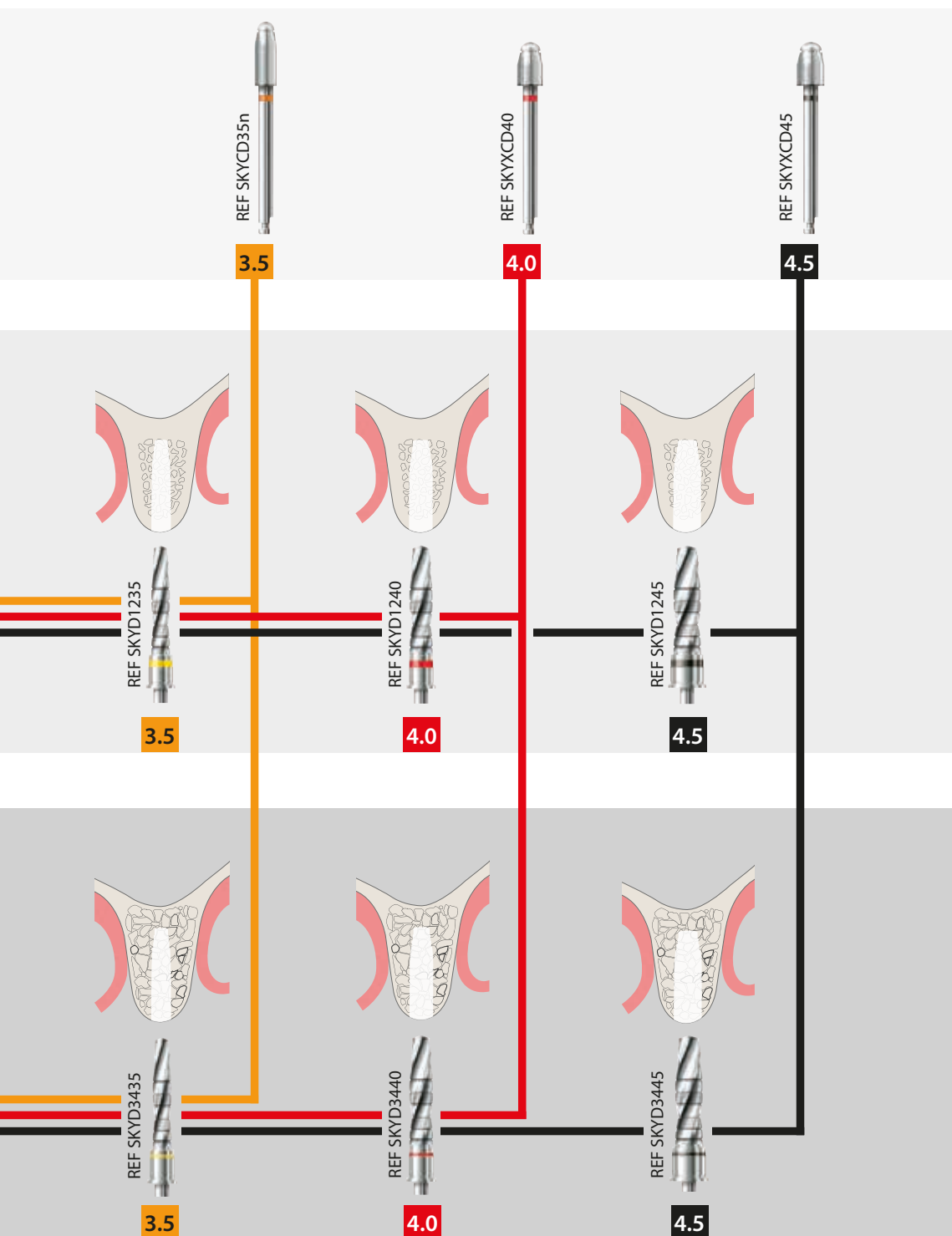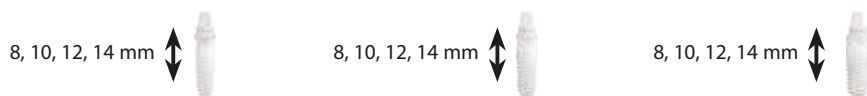

whiteSKY A.L. sebészeti protokoll



Implantátumhosszak

Crestal fúró

300 ford./perc

Kemény csont D1

300 ford./perc

Közepesen kemény / puha csont D2-D4

300 ford./perc

Részlegesen irányított előkészítés


Az implantátumágy előkészítése egészen a végfúróig irányítottan végezhető.

- A whiteSKY A.L. A Crestal fúrók szabad kézzel használhatók.
- Az implantátum behelyezése ezután szabad kézzel történik.

Kérjük, ProGuide használata esetén

vegye figyelembe a következőket:


- A Crestal fúrószárak nem illeszkednek a fúróhüvelyekbe.

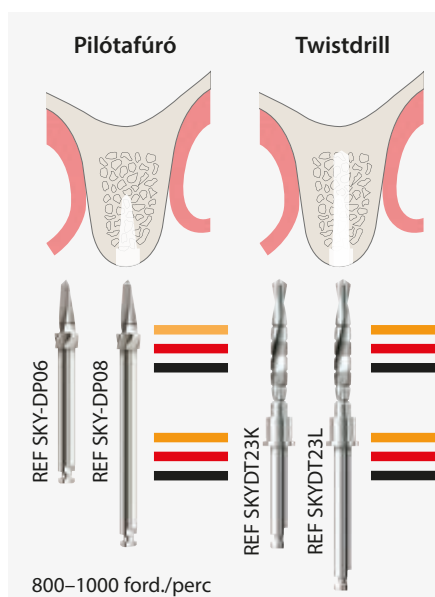











8, 10, 12, 14 mm

8, 10, 12, 14 mm

8, 10, 12, 14 mm

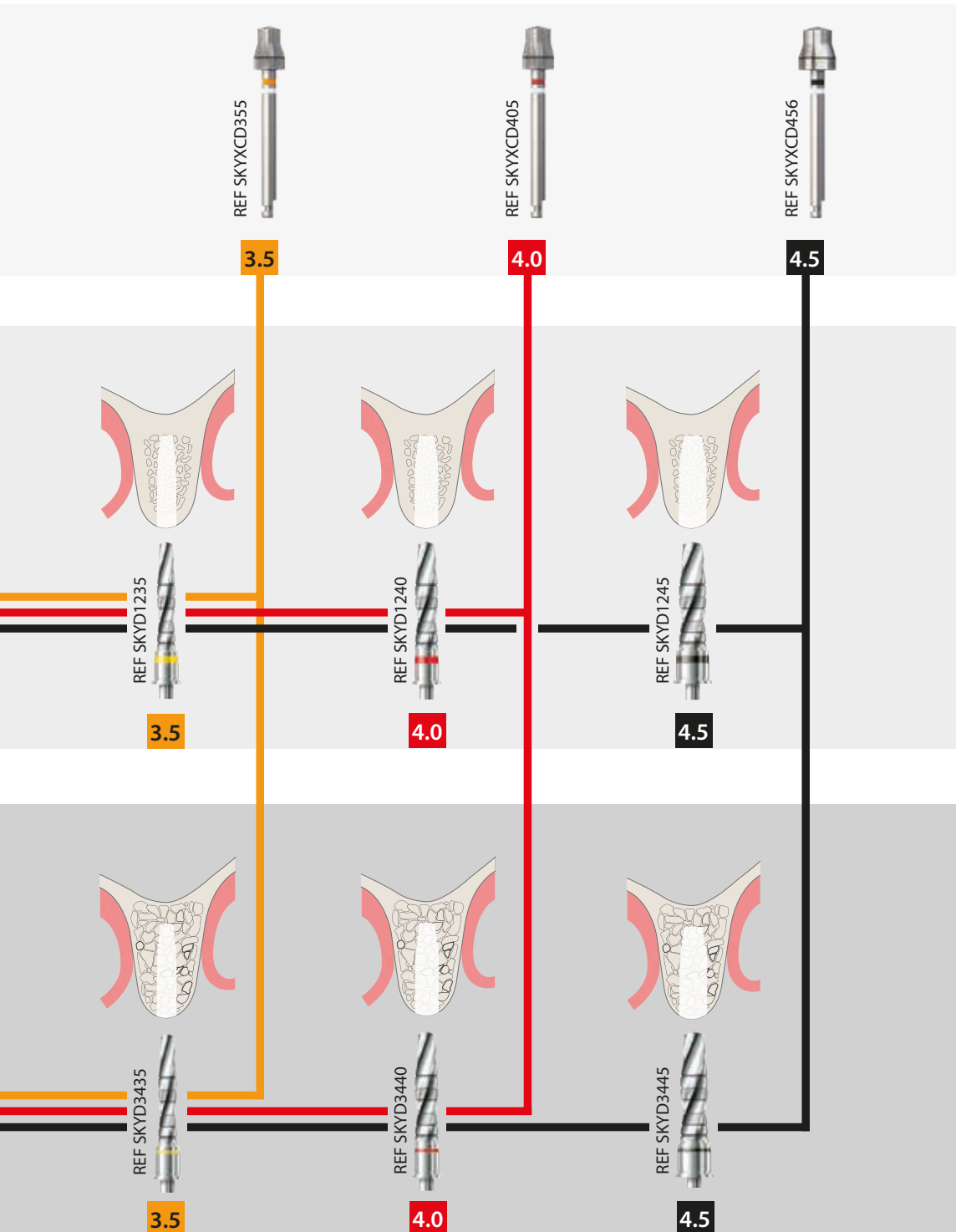

Azonnali beültetés – whiteSKY T.L.

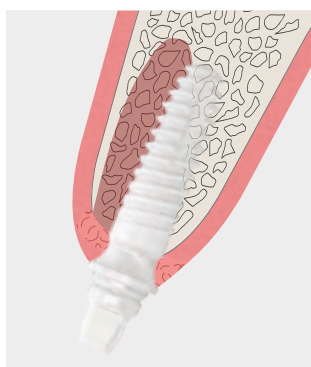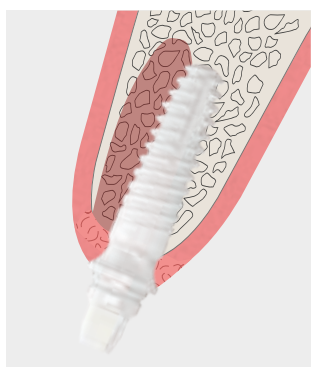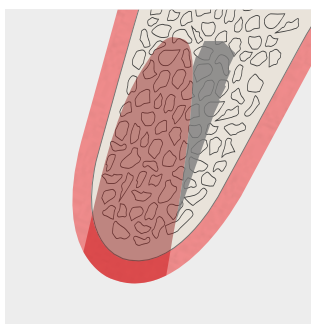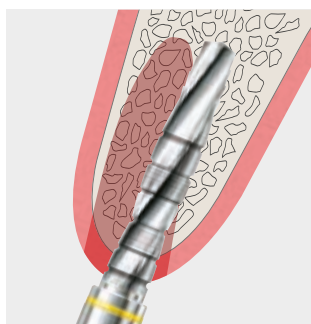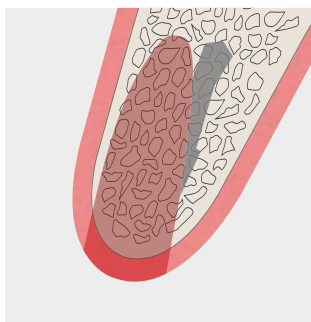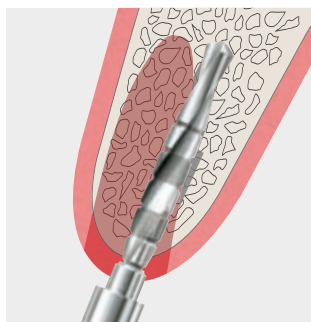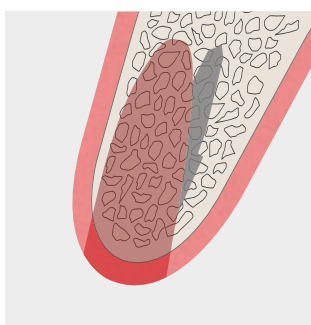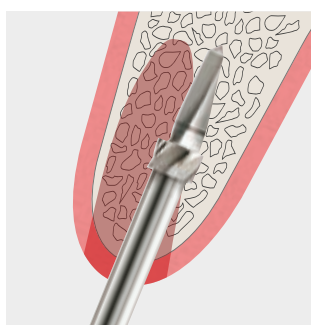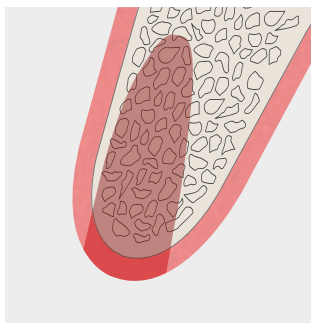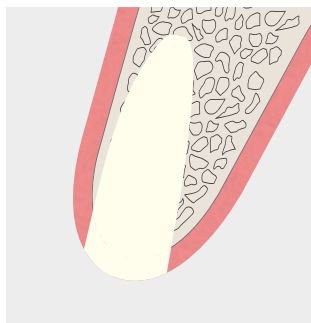

- Óvatosan távolítsa el a foggyökereket anélkül, hogy a vestibularis csontlemezek megsérüljenek.
- A fog kihúzása után gondosan távolítsa el a granulációs szövetet, és Helbo aPDT-vel fertőtlenítsen az üreget.

- Az implantátum tengelyiránya eltér a fogmedrek tengelyirányától.
- A pilótafúró hegyes végével módosítható a kiigazítás.

- A twistdrill segítségével az új tengely a végleges mélységig meghosszabbítható.

- A végfúró megnöveli az üreg átmérőjét a csont minőségének megfelelően.
- A whiteSKY T.L. esetén az utolsó végfúróval az előkészítés befejeződött.



MEGJEGYZÉS:

Bizonyos esetekben előkészítés szükséges a hozzá tartozó Crestal fúrók segítségével.



- A whiteSKY Tissue Line esetén azonnali beültetésnél a Crestal fúróra nincs szükség. Az implantátumot be kell csavarni a hátsó domborulatig a csontba.

A whiteSKY Tissue Line-nal késői beültetés is lehetséges.


Azonnali beültetés – whiteSKY A.L.

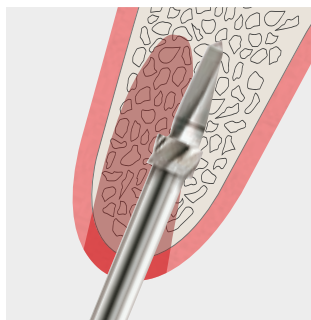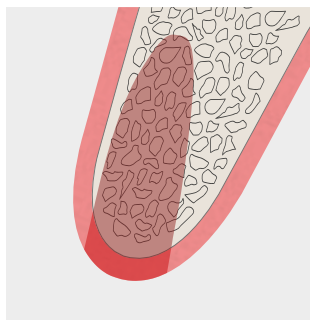



- Az üreg előkészítése a pilótafúró segítségével történik.

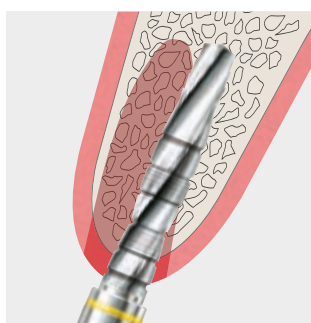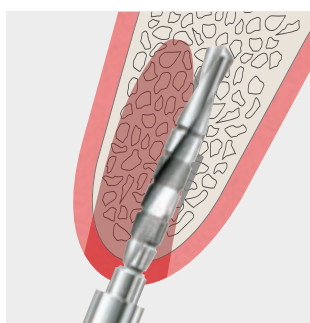

- Ezután a twistdrill és a végfúró segítségével fúrjuk ki a végső átmérőt.

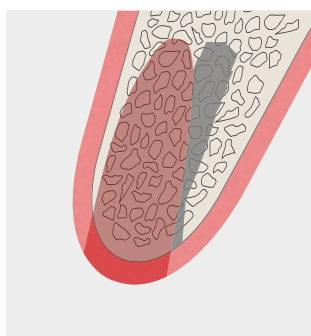


- A whiteSKY Alveo Line Crestal fúróval készítjük elő a keresztális régiót.

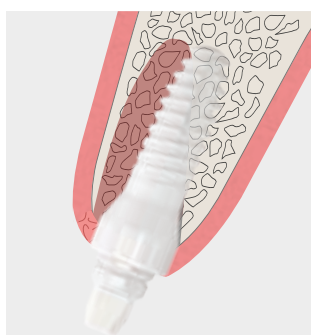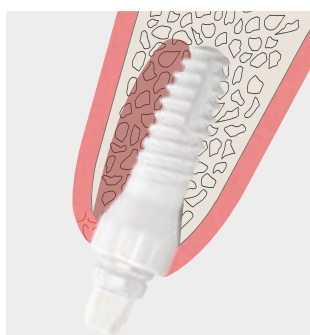

- Az implantátum behelyezésekor, a csontelhalás megelőzéséhez ügyelni kell arra, hogy a kúp alakú keresztális rész ne érjen a csonthoz.

A whiteSKY Alveo Line-nal késői beültetés is lehetséges.

Ideiglenes ellátás

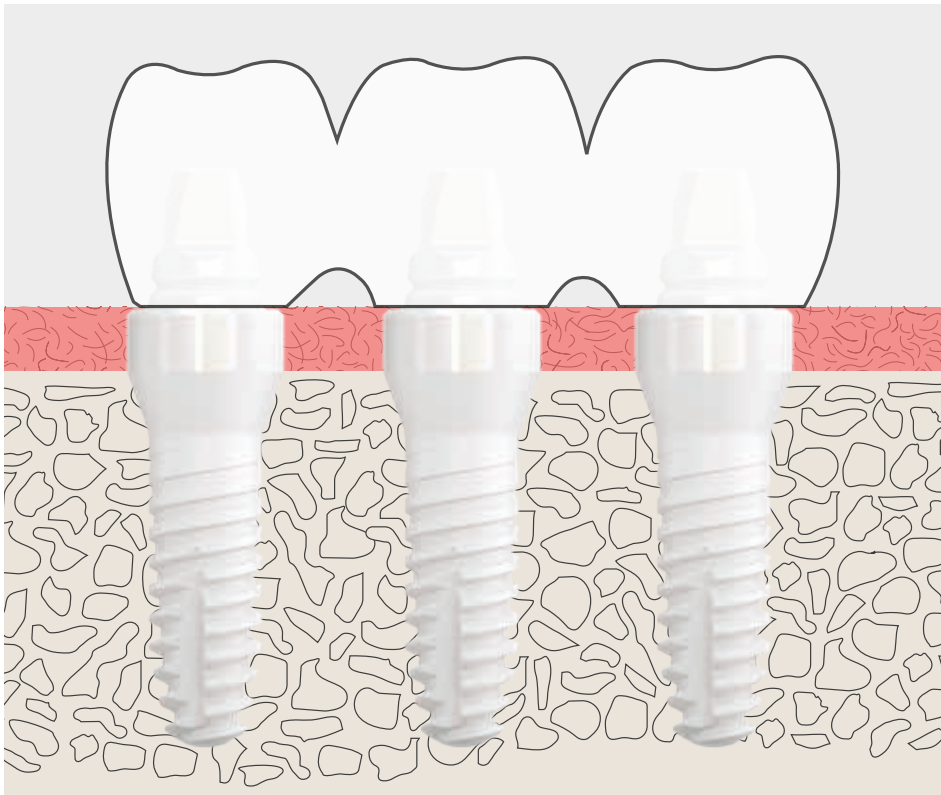


Ideiglenes ellátás

azonnali ellátás esetén:

- A laterotruziós érintkezések elkerülése
- A funkcionális okkluzális terhelés kizárása
- A több implantátumnak mindig blokkolnia kell egymást
- Szükség esetén stabilizálás műanyag blokkolással a szomszédos fogakkal savas maratási technológiával
- Ne húzza a provizóriumot az implantátum váll fölé.

Visszahívás/Utólagos ellenőrzés

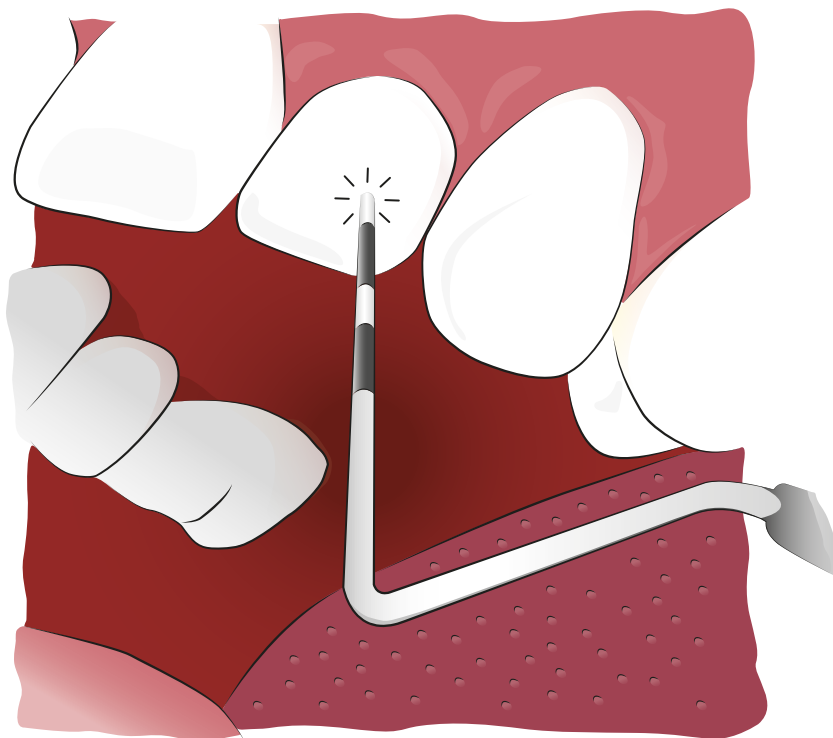

Utókezelés:

- Ellenőrzés kopogásvizsgálattal fémszondával egy hét eltelte után
- Ha megszűnt a blokkolás, rögzítse újra
- Tompa kopogó hang esetén hosszabbítsa meg a gyógyulási időt, ha szükséges, csavarja mélyebbre az implantátumot

**whiteSKY Tissue Line**

- Személyre szabás csak a megjelölt pontoknál
- A megmunkáláshoz használjon piros (finom) gyémántcsiszolót
- Csak könyökidommal (5:1), hűtéssel

**whiteSKY Alveo Line**

- Személyre szabás csak a megjelölt pontoknál végezhető
- A megmunkáláshoz használjon piros (finom) gyémántcsiszolót
- Csak hűtéssel könyökidommal (5:1)

FONTOS:

- Személyre szabás után analógok nem használhatók
- A CAD-könyvtár nem használható

A szelektív piaci bevezetés kérdései

Szkennelhető a whiteSKY A.L.?

Igen, a whiteSKY implantátumok közvetlenül szkennelhetők, függetlenül attól, hogy azok személyre szabottak vagy sem.

FIGYELEM:

Személyre szabott implantátumok esetén a Könyvtár nem használható! Ebben az esetben az implantátumokat úgy kell használni, mint egy természetes fogat.

Létezik a whiteSKY A.L. számára kiegészítő készlet?

Igen. Ez a kiegészítő készlet tartalmazza a whiteSKY behajtóeszközöket és a Crestal fúrókat. Ha az ügyfél mindkét whiteSKY implantátum termékvonalat szeretné használni, akkor szüksége van a whiteSKY T.L + A.L. bővítőkészletre is.

Az implantátumot csak kézzel lehet becsavarni?

Nem, géppel is becsavarhatja.

FONTOS:

A behajtónak alul fel kell feküdnie a platformra. Becsavaráskor további oldaleroőket nem szabad alkalmazni.

Hogyan lesz a protézis cementezve cirkónium implantátumok esetén?

Ideiglenes ellátás esetén Temp-Bond-dal. Végleges ellátás esetén gyantacementtel (pl. DTK). Cirkónium implantátumok esetén alkalmazható üvegionomer cement.

A whiteSKY A.L. esetében speciális Crestal fúróra van szükség?

Igen A whiteSKY Alveo Line kidomborodó formája miatt speciális Crestal fúrók szükségesek, úgy az azonnali, mind a késői beültetésnél.

Miért nem lehet az implantátumot a behajtóeszközzel kivenni a csomagolásból?

Mivel az implantátumon nincsenek kúpos felületek, nem szorítható be a behajtóeszközbe. Ezért a kivételt a műanyag tartóval kell végezni. Így az implantátum a végleges rögzítésig becsavarható. Ha az implantátum szilárdan és stabilan rögzül, a műanyag tartó könnyen lehúzható.

Lehet az implantátumot csiszolni?

Igen, a whiteSKY A.L. széles implantátumvállával egyénileg ideálisan hozzáigazítható a fogínyhez. Ez is a lényeges különbség a Tissue Line-val szemben, hogy ezen a területen a személyre szabás nem lehetséges.

Implantátumok

whiteSKY

Tissue Line	399,00 €	L 8 mm	L 10 mm	L 12 mm	L 14 mm
	3.5	wSKYT3508	wSKYT3510	wSKYT3512	wSKYT3514
	4.0	wSKYT4008	wSKYT4010	wSKYT4012	wSKYT4014
	4.5	wSKYT4508	wSKYT4510	wSKYT4512	wSKYT4514

whiteSKY

Alveo Line	399,00 €	L 8 mm	L 10 mm	L 12 mm	L 14 mm
	3.5	wSKYA3508	wSKYA3510	wSKYA3512	wSKYA3514
	4.0	wSKYA4008	wSKYA4010	wSKYA4012	wSKYA4014
	4.5	wSKYA4508	wSKYA4510	wSKYA4512	wSKYA4514

whiteSKY protetikai komponensek

Mintázókupakok

25,00 €



1 db

wSKYICAP

hamarosan

Laboranalóg


T.L. 27,50 €



1 db

wSKYLABA

A.L. 27,50 €

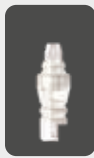

1 db

wSKYLAAL

Protetikai sapkák

26,50 €



1 db

wSKYPROC

whiteSKY Alveo Line - Crestal fúró

63,00 €

3.5

Platform Ø 5



SKYXCD355

63,00 €

4.0

Platform Ø 5



SKYXCD405

63,00 €

4.5

Platform Ø 6



SKYXCD456

60,00 €



whiteSKY Upgrade Kit TL

WSKTUPGK

180,00 €



whiteSKY Upgrade Kit TL + AL

WSKAUPGK

white SKY



009 084HU-20220506 A tévedés és a változtatás jogát fenntartjuk!



DENTAL INNOVATIONS
SINCE 1974

bre^{dent}
group

Nyíri Zoltán · egészségügyi terméktanácsadó · T: +36 203641589 · @: zoltan.nyiri@bredent.com · Vaslaki Krisztián · egészségügyi terméktanácsadó · T: +36 302226392 · @: krisztian.vaslaki@bredent.com
bredent Group Magyarország Kft · Táborhegyi út 9 · HU 1037 Budapest · T: +3616031543 · www.bredent-medical.com · INFORMACIO.MAGYARORSZAG@BREDENT-GROUP.COM