



Esta hoja de indicaciones contiene toda la información de importancia sobre cómo debe actuar después de haber sido intervenido quirúrgicamente. Si sigue las siguientes indicaciones conseguirá una larga vida útil para sus implantes.

1. **No coma ni beba** antes de que haya dejado de tener efecto la anestesia local, de lo contrario podría morderse sin querer la mejilla.
2. Puesto que disminuye la capacidad de reacción tras una intervención, **no debería conducir ningún vehículo**.
3. **Enfríe** la zona afectada durante las primeras horas después de la intervención. No deje la bolsa de gel o la compresa húmeda enfriando más de medio minuto en un mismo sitio para que no se produzca una hipotermia.
4. **Evite** tras la intervención un consumo excesivo de alcohol así como bebidas con cafeína como el café, el té negro o el té verde.
5. Durante los primeros días **no realice esfuerzos físicos**, en particular deportes, ni actividades que den mucho calor, como sesiones de sauna o baños de sol.
6. **Evite** del todo fumar hasta que le hayan retirado los puntos. Fumar pone en riesgo la irrigación sanguínea, lo que puede producir serios problemas para la cicatrización y conllevar incluso la pérdida espontánea del implante.
7. En los siguientes días se formará un coágulo de sangre, que ayuda en la cicatrización de la herida. La capa gris que aparece forma asimismo parte del proceso de reparación generado por el propio organismo, por lo que no debe quitarla.
8. Un ligero sangrado postquirúrgico en la herida es algo normal. Estas pequeñas hemorragias puede curárselas usted mismo mordiendo una torunda de gasa o un pañuelo de tela contra la herida. Es raro que se produzca una hemorragia mayor. Si se diera el caso, llámenos o diríjase al servicio médico de urgencias.
9. **Evite** sobrecargar en exceso la zona de la herida. Puede limpiarse los dientes de la forma habitual, pero sin tocar en la herida. No apriete con los dedos alrededor de la herida. Enjuáguese la boca después de las comidas con un colutorio o con infusión de salvia.
10. A ser posible **no tome productos lácteos frescos** con cultivos de bacterias (p.ej. yogur). Los cultivos lácteos que contienen estos productos pueden provocar infecciones y problemas en la cicatrización.

» [Volver la página](#)



## Información para pacientes tras la inserción de implantes SKY fast & fixed

**SKY**  
IMPLANT SYSTEM

Página 2 de 2

Información para pacientes

11. Durante 6 semanas deberá llevar una **dieta blanda** (pasta, arroz, verdura, pescado y carne tierna, etc.). Deberá evitar alimentos tales como frutos secos, pan duro, carne dura y otros similares, que requieran masticarse mucho.
12. En algún caso, aunque raramente, puede soltarse un tornillo y a veces también puede romperse un puente provisional. Si ocurriera esto, deberá acudir enseguida a la clínica dental para que el puente pueda atornillarse de nuevo o repararse. Si no se soluciona esto pueden producirse daños mayores e incluso se podría llegar a perder el implante.
13. Rogamos que tome los **medicamentos que le hemos prescrito** en la dosis indicada. En caso de padecer dolor puede tomar analgésicos, pero tenga en cuenta la información incluida en el paquete en cuanto a la aplicación y tolerabilidad de los mismos. Sin embargo, no tome AAS (Aspirina®), pues puede producir hemorragias.

Si tiene dolores persistentes o hemorragias de consideración, por favor, llámenos.

¡Le deseamos una buena recuperación!

El equipo de su clínica dental

Sello de la clínica/Firma

Fecha de recepción de las indicaciones

Firma del paciente

Salvo error y modificaciones 0008260E-20150707  
Todos los nombres que aparecen acompañados de ® o ™ son marcas registradas  
y/o denominaciones sociales de titulares del derecho de propiedad intelectual.



DENTAL INNOVATIONS  
SINCE 1974

bredent  
group