

whiteSKY Alveo Line & Tissue Line

Указание за употреба



Хирургичен протокол *свободна ръка*

2

Хирургичен протокол *whiteSKY T.L.*



Дължина на импланта

Кристално свредло

300 об/мин

Твърда кост D1

300 об/мин


Среднотвърда / мека
кост D2-D4

300 об/мин




Извършена обработка


Обработката на леглото на импланта може да се извърши от *whiteSKY T.L.* Имплантите също трябва да се насочват.

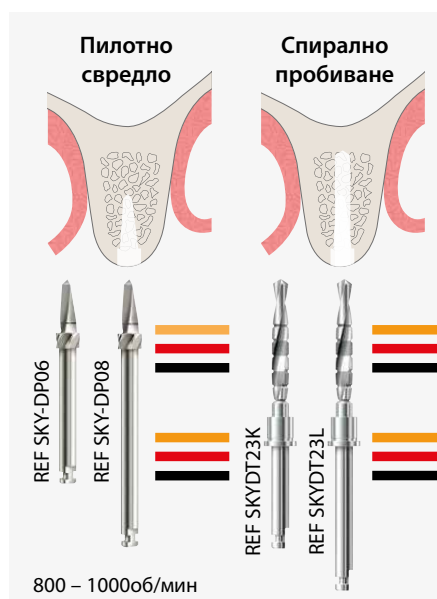След това поставянето на импланта се извършва свободно.



TISSUE LINE

8, 10, 12, 14 mm  8, 10, 12, 14 mm  8, 10, 12, 14 mm 

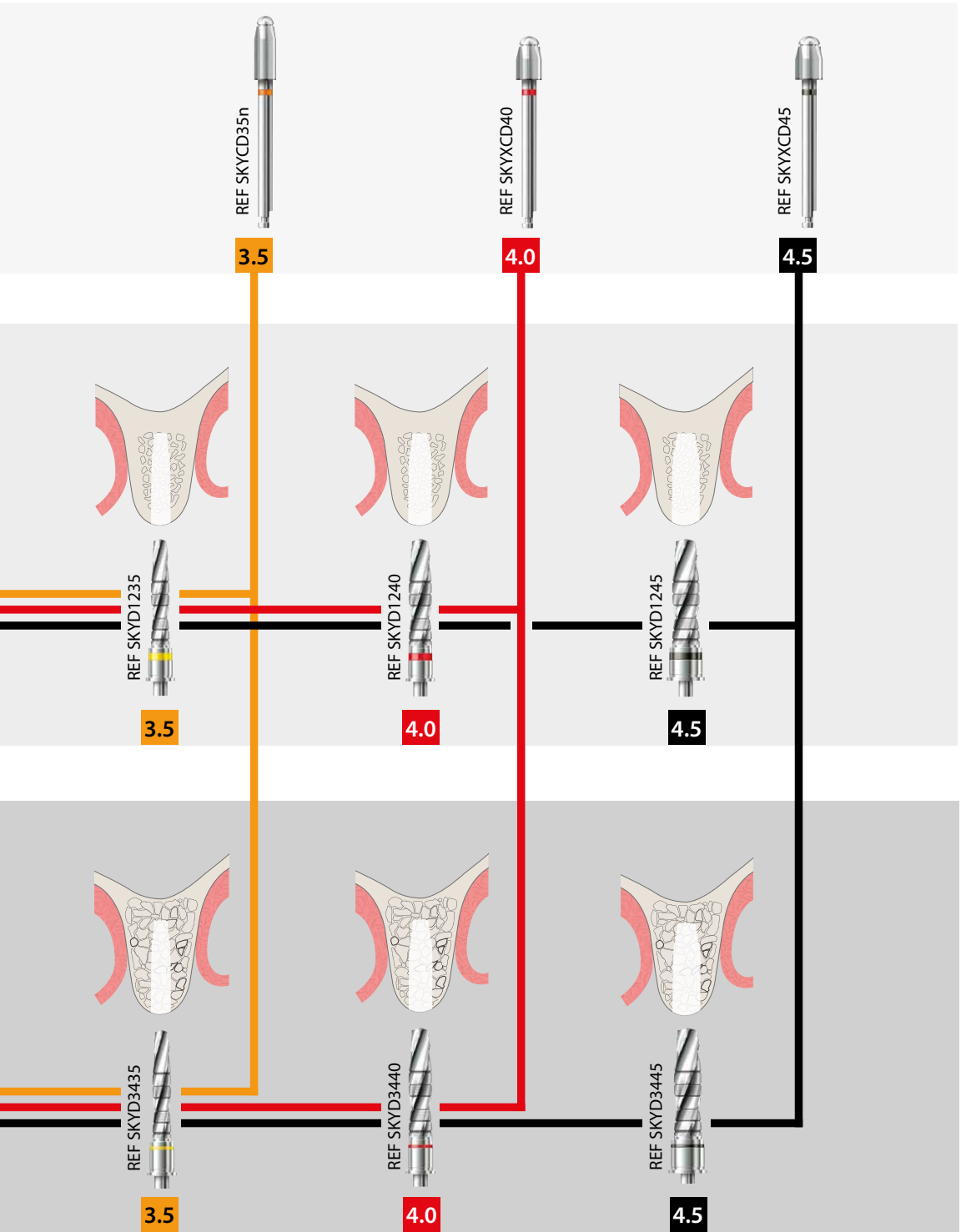

Хирургичен протокол *whiteSKY A.L.*



Дължина на импланта

Кристално свредло

300 об/мин

Твърда кост D1


Частично извършвана обработка

След това подготовката на леглото на импланта може да се направлява до финалното свредло.

- Кристалните свредла за *whiteSKY A.L.* се използват свободно.
- След това поставянето на импланта се извършва свободно.

Моля, имайте предвид, че при използването на ProGuide:

- Кристалните свредла не пасват на втулките за свредла.

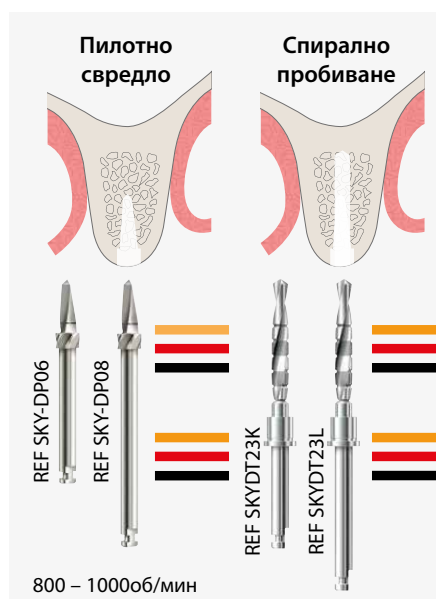

300 об/мин

Среднотвърда / мека
кост D2-D4

300 об/мин

ALVEO LINE

8, 10, 12, 14 mm

8, 10, 12, 14 mm




8, 10, 12, 14 mm



3.5

4.0

4.5

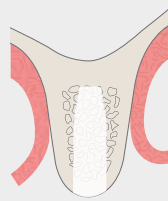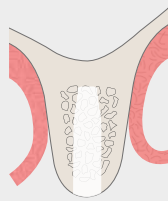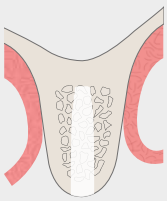

REF SKYD1235




REF SKYD1240

REF SKYD1245

3.5

4.0

4.5

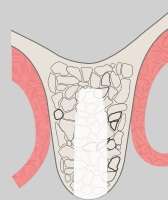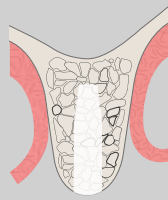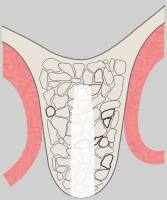

REF SKYD3435

REF SKYD3440











REF SKYD3445

3.5

4.0

4.5

Незабавно имплантиране - whiteSKY T.L.

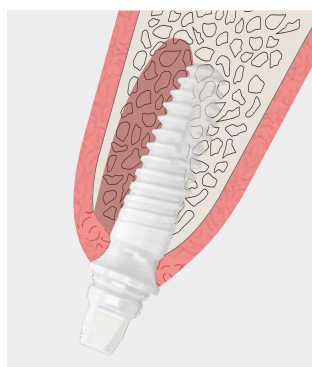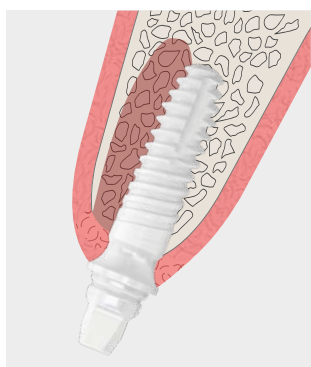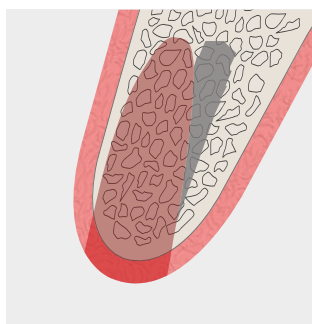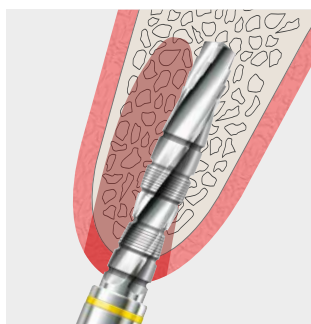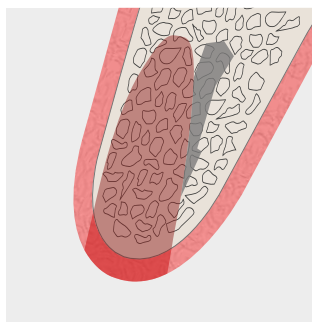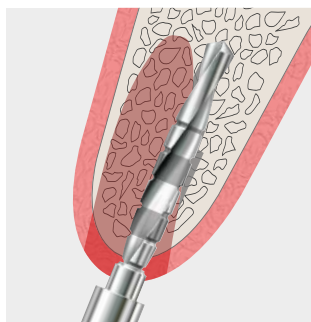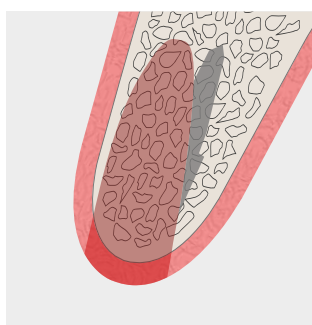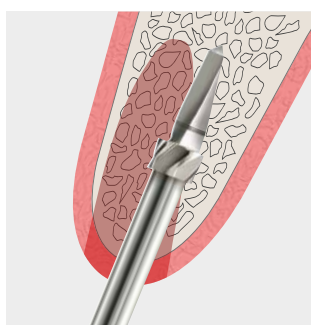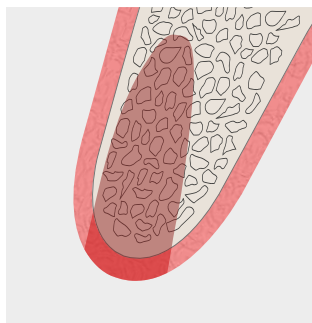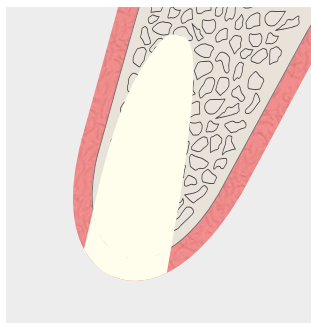

- Внимателно отстранете корените на зъбите, без да повредите везибуларната костна ламела.
- След изваждане на зъба, грануляционната тъкан трябва да се отстрани основно и кухината да се дезинфекцира с Helbo aPDT.

- Аксиалната посока на импланта се отклонява от аксиалната посока на гнездото.
- С острия връх на пилотното свредло може да се променя ориентацията.

- С винтовото пробиване новата ос се удължава до окончателната дълбочина.

- Финалните свредла разширяват диаметъра на кухината в зависимост от качеството на костта.
- При whiteSKY T.L. обработката завършва след последното финално свредло.

УКАЗАНИЕ:

В някои случаи е необходима подготовка с помощта на съответните кристални свредла.



- При линия whiteSKY Tissue за незабавна имплантация кристалното свредло не е необходимо. Имплантът се завива в костта до задния конус.

Късно имплантиране е възможно при whiteSKY Tissue Line.



Незабавно имплантиране - whiteSKY A.L.





- Подготовката на кухината се извършва с пилотното свердрло.

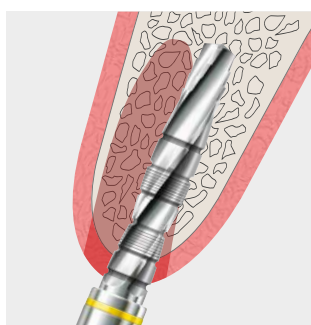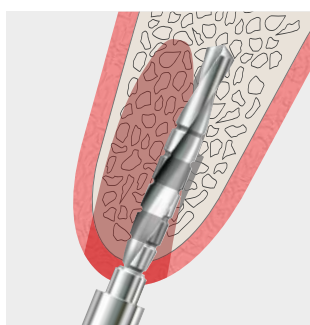

- След това с винтово свердрло и финално пробиване до крайния диаметър.

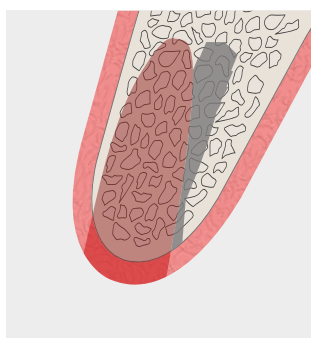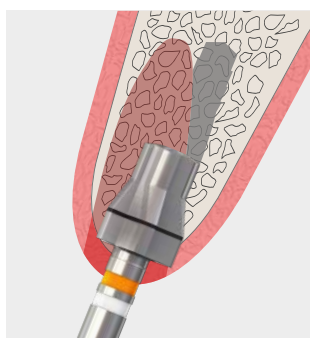


- С линия whiteSKY Alveo Кресталното пробиване, се използва за Крестално лале.

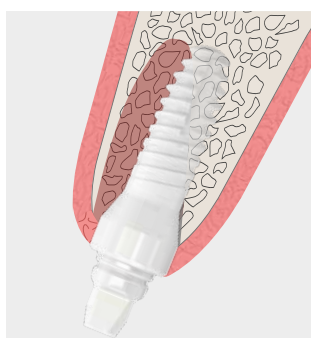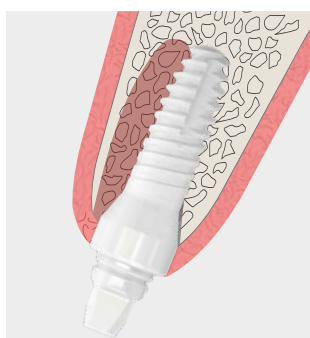

- Когато поставяте импланта, се уверете, че коничната крестална зона не докосва костта, за да избегнете некроза на костта.

Късно имплантиране е възможно при whiteSKY Alveo Line.


Временно възстановяване

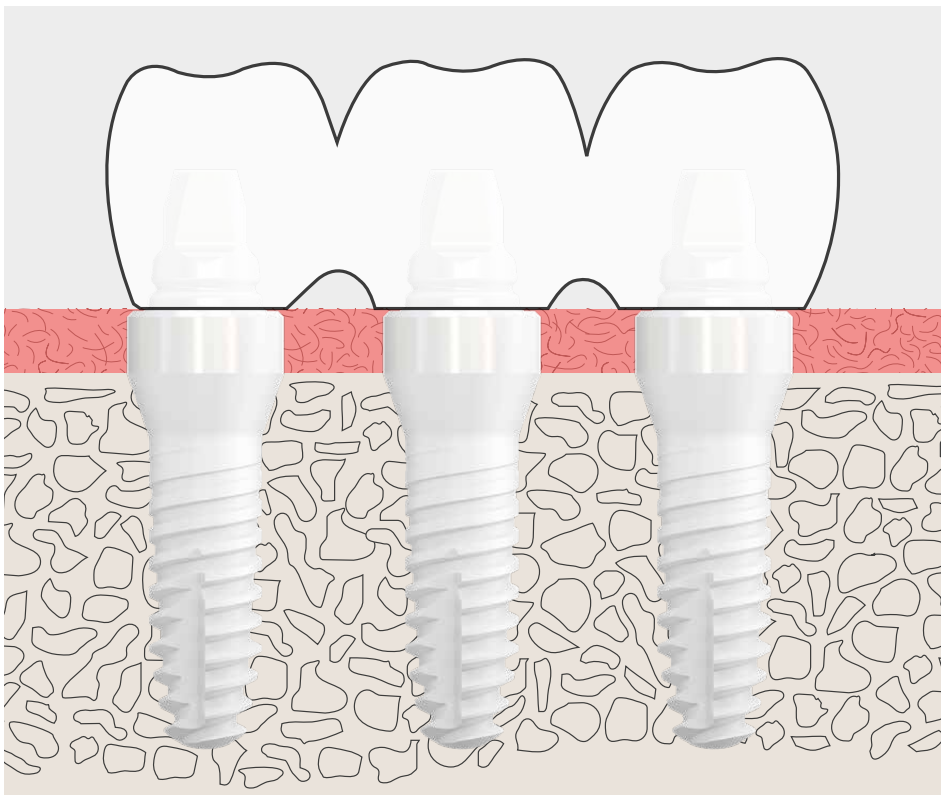

Временно възстановяване с незабавно възстановяване:

- Избягване на латеротрузионни контакти
- Без функционално оклузално натоварване
- Винаги блокирайте няколко импланта един с друг
- При необходимост от стабилизиране чрез пластмасово шиниране със съседни зъби чрез технология за киселинно ецване
- Не изтегляйте временния имплант над рамото на импланта

Извикване/последващ контрол

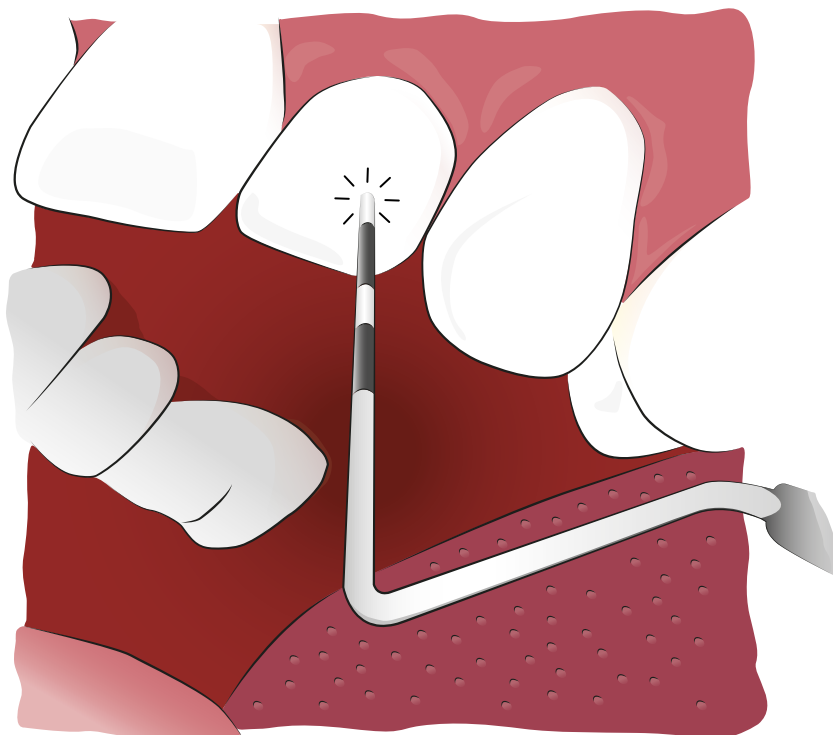

Последваща обработка:

- Проверка чрез тест с почукване с метална сонда след една седмица
- При изгубване на блокирането, фиксирайте го отново
- Ако се чува притъпен звук при почукване, удължете времето за заздравяване, а при нужда завинтете импланта по-дълбоко

**whiteSKY Tissue Line**

- Индивидуално само на отбелязаните места
- Използвайте червен диамантен шлайф (фин) за обработка
- Само с ъглов елемент (5:1) с охлаждане

**whiteSKY Alveo Line**

- Персонализирайте само в маркираните места
- Използвайте за обработката червен диамантен шлайф (фин)
- Само с обратен наконечник (5:1) с охлаждане

ВАЖНО:

- След индивидуализацията аналози не могат да се използват
- Не може да се използва CAD-Library

Въпроси от селективното въвеждане на пазара

Може ли whiteSKY A.L. да бъдат сканирани?

Да, имплантите whiteSKY се сканират директно, независимо от това дали са индивидуализирани или не.

ЗАБЕЛЕЖКА:

За персонализирани импланти Library не може да се използва! В този случай имплантите трябва да се използват като естествен зъб.

Има ли за whiteSKY A.L.

допълнителен комплект за надстройка?

Да. Този комплект за надстройка съдържа инструменти за завинтване whiteSKY и кристално свредло.

Ако някой клиент иска да работи и с двете линии импланти whiteSKY, то той се нуждае от комплекта whiteSKY Upgrade Kit T.L + A.L.

Имплантът само ръчно ли може да се завинти?

Не, можете да го завиете и с машина.

ВАЖНО:

Инструментът за завинтване трябва да застане долу на платформата. Освен това при завинтването не трябва да се прилагат странични сили.

Как протетиката се циментира при циркониевите импланти?

При временно възстановяване с Tembond. В случай на окончателно възстановяване със смола цимент, напр. DTK Циркониевите възстановявания могат да бъдат обработени със стъклен цимент.

Необходимо ли е за whiteSKY A.L. Да се използва специално кристално свредло?

Да. Сложната форма на линията whiteSKY Alveo изисква използването на специално кристално свредло, както при незабавното имплантиране, така и при късното имплантиране.

Защо имплантът не може да се извади от опаковката с инструмента за поставяне?


Тъй като имплантът няма конични повърхности, той не може да бъде захванат в инструмента за завинтване. Поради това изваждането трябва да се извърши с пластмасовия държач. По този начин имплантът може да бъде завит до стабилно положение. Ако имплантът е здраво и стабилно поставен, може леко да се изтегли пластмасовият държач.

Може ли имплантът да се шлайфа?


Да, с широкото си рамо за импланти whiteSKY A.L. има идеални предпоставки за индивидуално адаптиране към историята на гингивата. Това е основната разлика спрямо линията Tissue, че в тази област не може да се индивидуализира.

Имплантна

whiteSKY

Tissue Line		L 8 mm	L 10 mm	L 12 mm	L 14 mm
	3.5	wSKYT3508 <input type="checkbox"/>	wSKYT3510 <input type="checkbox"/>	wSKYT3512 <input type="checkbox"/>	wSKYT3514 <input type="checkbox"/>
	4.0	wSKYT4008 <input type="checkbox"/>	wSKYT4010 <input type="checkbox"/>	wSKYT4012 <input type="checkbox"/>	wSKYT4014 <input type="checkbox"/>
	4.5	wSKYT4508 <input type="checkbox"/>	wSKYT4510 <input type="checkbox"/>	wSKYT4512 <input type="checkbox"/>	wSKYT4514 <input type="checkbox"/>

whiteSKY

Alveo Line		L 8 mm	L 10 mm	L 12 mm	L 14 mm
	3.5	wSKYA3508 <input type="checkbox"/>	wSKYA3510 <input type="checkbox"/>	wSKYA3512 <input type="checkbox"/>	wSKYA3514 <input type="checkbox"/>
	4.0	wSKYA4008 <input type="checkbox"/>	wSKYA4010 <input type="checkbox"/>	wSKYA4012 <input type="checkbox"/>	wSKYA4014 <input type="checkbox"/>
	4.5	wSKYA4508 <input type="checkbox"/>	wSKYA4510 <input type="checkbox"/>	wSKYA4512 <input type="checkbox"/>	wSKYA4514 <input type="checkbox"/>

Протезни компоненти whiteSKY

Капачки за отпечатък





Лабораторен аналог




Протезни капачки



Линия whiteSKY Alveo - кристално свредло

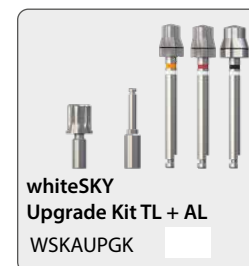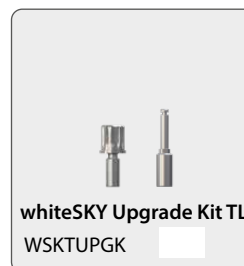

white
SKY

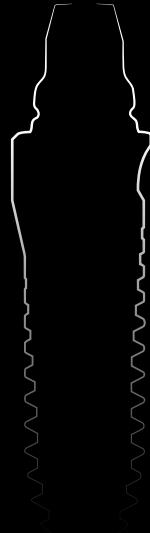

DENTAL INNOVATIONS
SINCE 1974

breident
group

breident group Bulgaria · Osogovo str 86 · Office 501/ BG 1303, Sofia · T: +359 877 258759 · www.breidentgroup.bg · office@breidentgroup.bg



0091 0848G-20240318 · Запазваме си правото да правим промени и корекции