

whiteSKY Alveo Line & Tissue Line

Használati utasítások



whiteSKY T.L. sebészeti protokoll



Implantátumhosszak

Crestal fúró

300 ford./perc

Kemény csont D1


300 ford./perc

Közepesen kemény / puha csont D2-D4




300 ford./perc


Írányított előkészítés

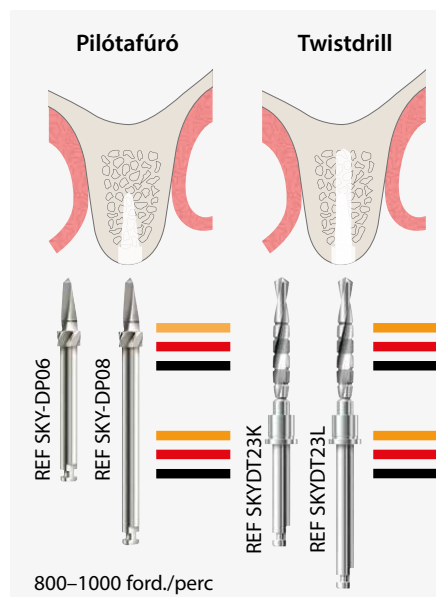Az implantátumágy előkészítése a whiteSKY T.L. implantátumoknál úgyszintén irányítottan végezhető. Az implantátum behelyezése ezután szabad kézzel történik.



TISSUE LINE

8, 10, 12, 14 mm  8, 10, 12, 14 mm  8, 10, 12, 14 mm 

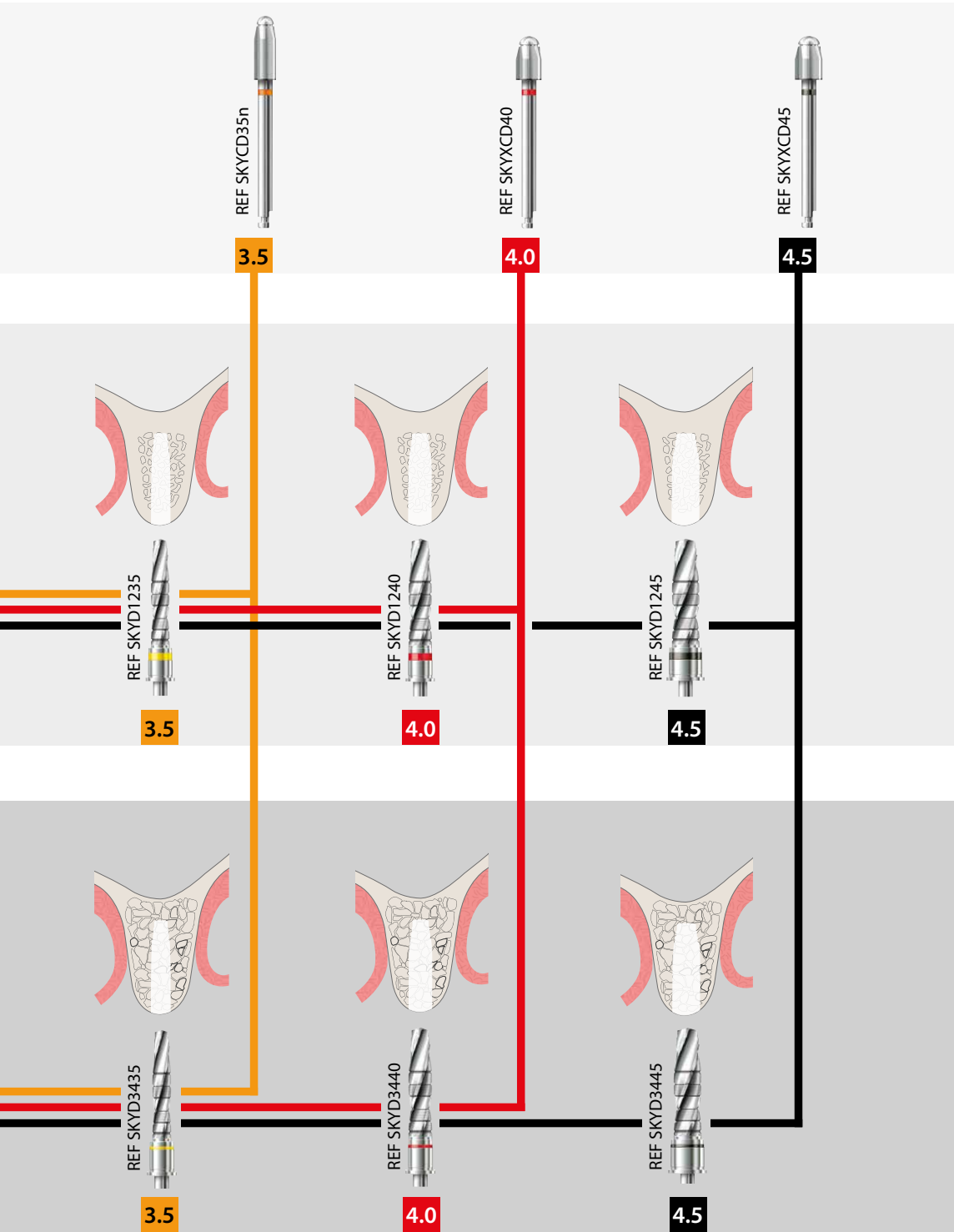

whiteSKY A.L. sebészeti protokoll



Implantátumhosszak

Crestal fúró

300 ford./perc

Kemény csont D1

300 ford./perc

Közepesen kemény / puha csont D2-D4

300 ford./perc

Részlegesen irányított előkészítés


Az implantátumágy előkészítése egészen a végfúróig irányítottan végezhető.

- A whiteSKY A.L. A Crestal fúrók szabad kézzel használhatók.
- Az implantátum behelyezése ezután szabad kézzel történik.

Kérjük, ProGuide használata esetén

vegye figyelembe a következőket:

- A Crestal fúrószárak nem illeszkednek a fúróhüvelyekbe.

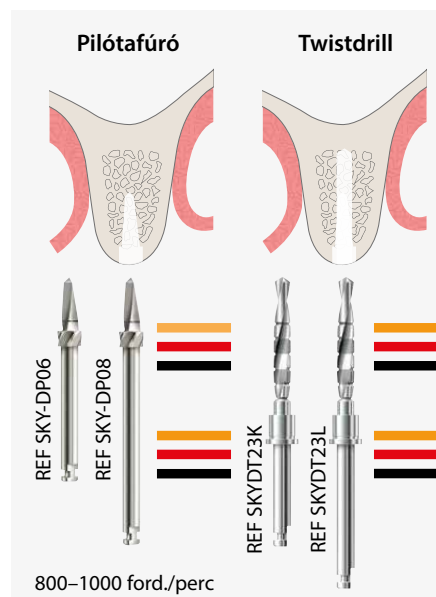

800-1000 ford./perc

ALVEO LINE

8, 10, 12, 14 mm

8, 10, 12, 14 mm




8, 10, 12, 14 mm



3.5

4.0

4.5

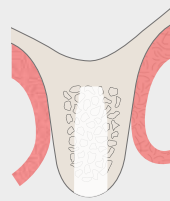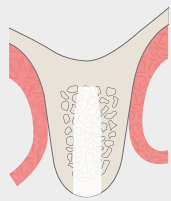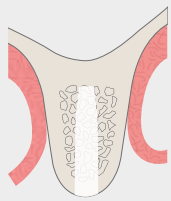

REF SKYD1235




REF SKYD1240

REF SKYD1245

3.5

4.0

4.5

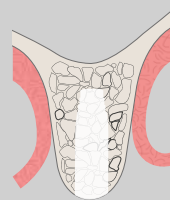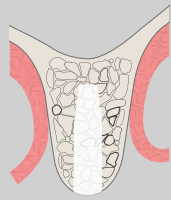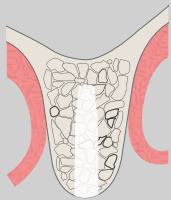

REF SKYD3435

REF SKYD3440











REF SKYD3445

3.5

4.0

4.5

Azonnali beültetés – whiteSKY T.L.

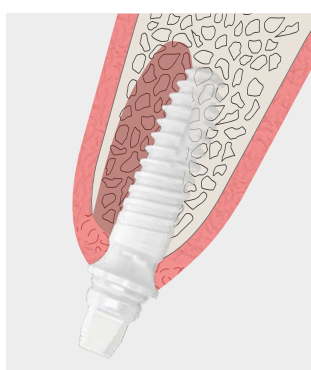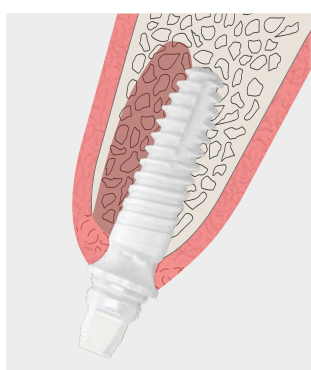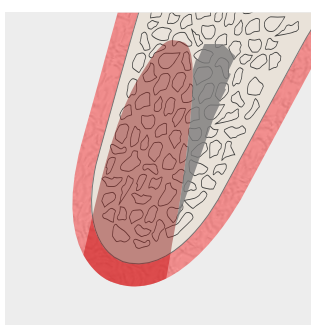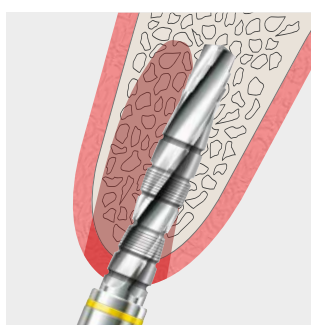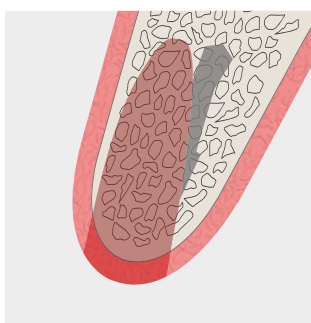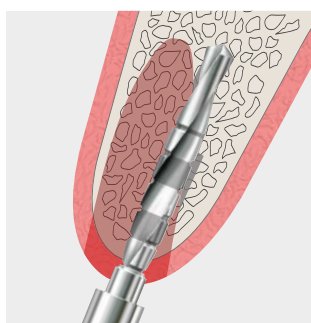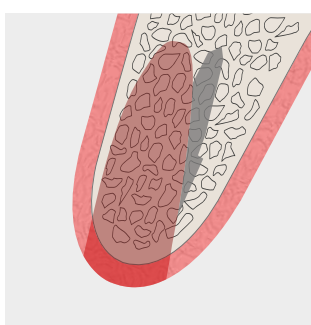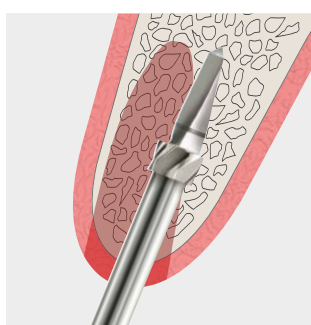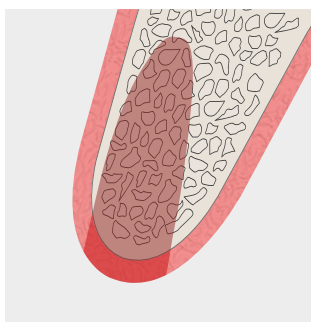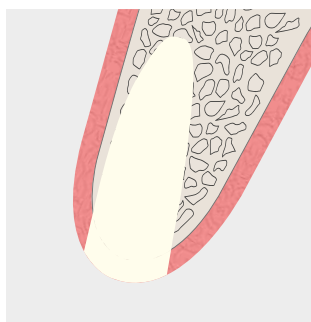

- Óvatosan távolítsa el a foggyökereket anélkül, hogy a vestibularis csontlemezek megsérüljenek.
- A fog kihúzása után gondosan távolítsa el a granulációs szövetet, és Helbo aPDT-vel fertőtlenítsen az üreget.

- Az implantátum tengelyiránya eltér a fogmedrek tengelyirányától.
- A pilótafúró hegyes végével módosítható a kiigazítás.

- A twistdrill segítségével az új tengely a végleges mélységig meghosszabbítható.

- A végfúró megnöveli az üreg átmérőjét a csont minőségének megfelelően.
- A whiteSKY T.L. esetén az utolsó végfúróval az előkészítés befejeződött.


MEGJEGYZÉS:

Bizonyos esetekben előkészítés szükséges a hozzá tartozó Crestal fúrók segítségével.



- A whiteSKY Tissue Line esetén azonnali beültetésnél a Crestal fúróra nincs szükség. Az implantátumot be kell csavarni a hátsó domborulatig a csontba.

A whiteSKY Tissue Line-nal késői beültetés is lehetséges.



Azonnali beültetés – whiteSKY A.L.

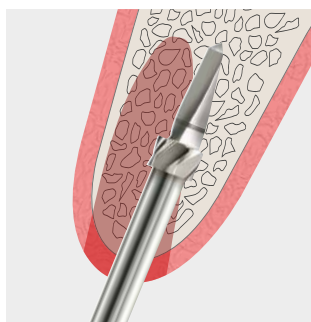



- Az üreg előkészítése a pilótafúró segítségével történik.

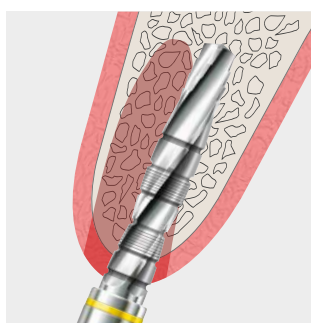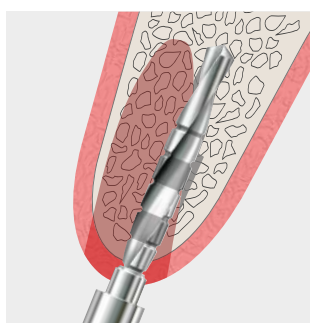

- Ezután a twistdrill és a végfúró segítségével fúrjuk ki a végső átmérőt.

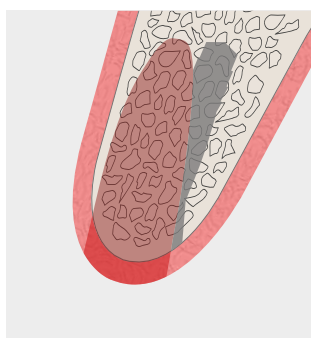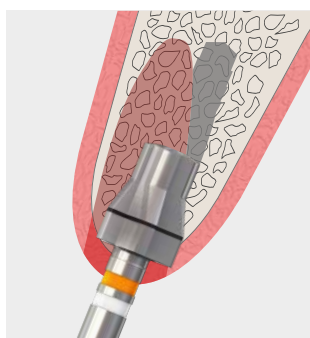


- A whiteSKY Alveo Line Crestal fúróval készítjük elő a kresztális régiót.

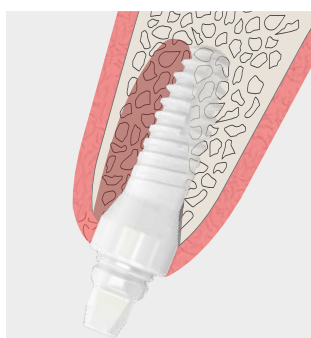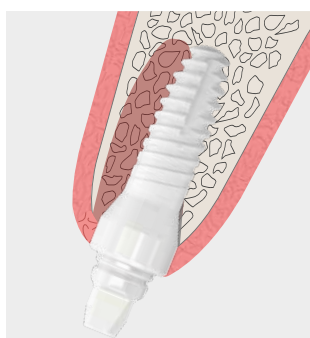

- Az implantátum behelyezésekor, a csontelhalás megelőzéséhez ügyelni kell arra, hogy a kúp alakú kresztális rész ne érjen a csonthoz.

A whiteSKY Alveo Line-nal késői beültetés is lehetséges.

Ideiglenes ellátás

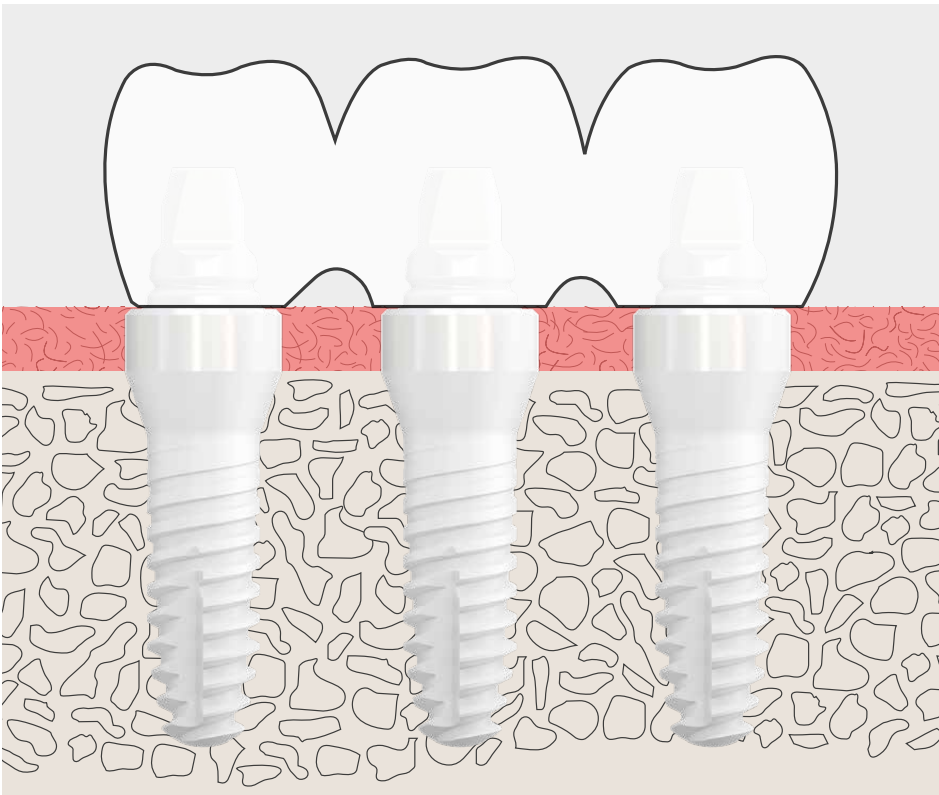


Ideiglenes ellátás

azonnali ellátás esetén:

- A laterotruziós érintkezések elkerülése
- A funkcionális okkluzális terhelés kizárása
- A több implantátumnak mindig blokkolnia kell egymást
- Szükség esetén stabilizálás műanyag blokkolással a szomszédos fogakkal savas maratási technológiával
- Ne húzza a provizóriumot az implantátum váll fölé.

Visszahívás/Utólagos ellenőrzés

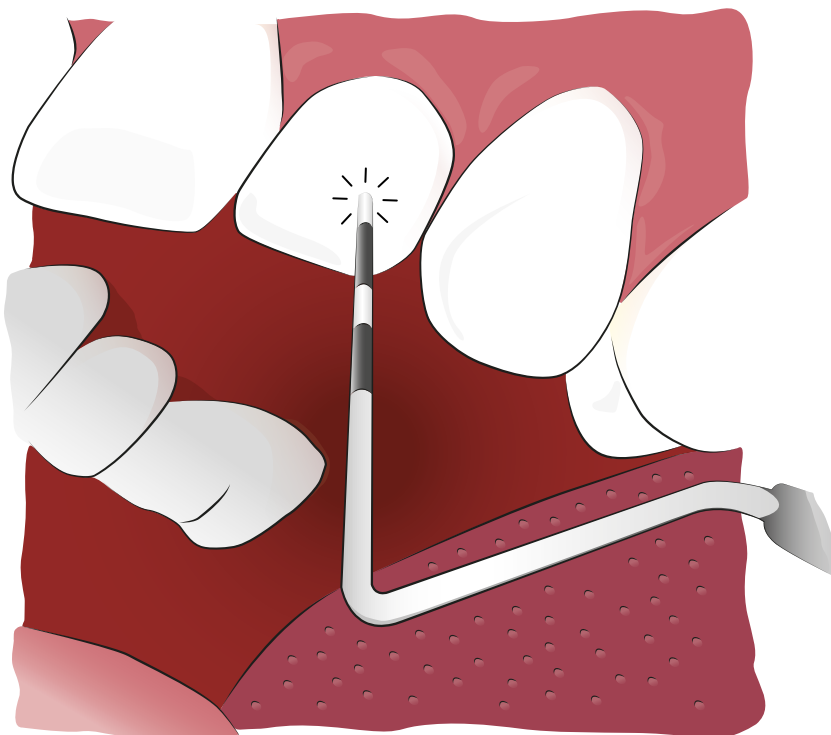

Utókezelés:

- Ellenőrzés kopogásvizsgálattal fémszondával egy hét eltelte után
- Ha megszűnt a blokkolás, rögzítse újra
- Tompa kopogó hang esetén hosszabbítsa meg a gyógyulási időt, ha szükséges, csavarja mélyebbre az implantátumot

**whiteSKY Tissue Line**

- Személyre szabás csak a megjelölt pontoknál
- A megmunkáláshoz használjon piros (finom) gyémántcsiszolót
- Csak könyökidommal (5:1), hűtéssel

**whiteSKY Alveo Line**

- Személyre szabás csak a megjelölt pontoknál végezhető
- A megmunkáláshoz használjon piros (finom) gyémántcsiszolót
- Csak hűtéssel könyökidommal (5:1)

FONTOS:

- Személyre szabás után analógok nem használhatók
- A CAD-könyvtár nem használható

A szelektív piaci bevezetés kérdései

Szkennelhető a whiteSKY A.L.?

Igen, a whiteSKY implantátumok közvetlenül szkennelhetők, függetlenül attól, hogy azok személyre szabottak vagy sem.

FIGYELEM:

Személyre szabott implantátumok esetén a Könyvtár nem használható! Ebben az esetben az implantátumokat úgy kell használni, mint egy természetes fogat.

Létezik a whiteSKY A.L. számára kiegészítő készlet?

Igen. Ez a kiegészítő készlet tartalmazza a whiteSKY behajtóeszközöket és a Crestal fúrókat. Ha az ügyfél mindkét whiteSKY implantátum termékvonalat szeretné használni, akkor szüksége van a whiteSKY T.L + A.L. bővítőkészletre is.

Az implantátumot csak kézzel lehet becsavarni?

Nem, géppel is becsavarhatja.

FONTOS:

A behajtónak alul fel kell feküdnie a platformra. Becsavaráskor további oldalrőket nem szabad alkalmazni.

Hogyan lesz a protézis cementezve cirkónium implantátumok esetén?

Ideiglenes ellátás esetén Temp-Bond-dal. Végleges ellátás esetén gyantacementtel (pl. DTK). Cirkónium implantátumok esetén alkalmazható üvegionomer cement.

A whiteSKY A.L. esetében speciális Crestal fúróra van szükség?

Igen A whiteSKY Alveo Line kidomborodó formája miatt speciális Crestal fúrók szükségesek, úgy az azonnali, mind a késői beültetésnél.

Miért nem lehet az implantátumot a behajtóeszközzel kivenni a csomagolásból?


Mivel az implantátumon nincsenek kúpos felületek, nem szorítható be a behajtóeszközbe. Ezért a kivételt a műanyag tartóval kell végezni. Így az implantátum a végleges rögzítésig becsavarható. Ha az implantátum szilárdan és stabilan rögzül, a műanyag tartó könnyen lehúzható.

Lehet az implantátumot csiszolni?


Igen, a whiteSKY A.L. széles implantátumvállával egyénileg ideálisan hozzáigazítható a fogínyhez. Ez is a lényeges különbség a Tissue Line-val szemben, hogy ezen a területen a személyre szabás nem lehetséges.

Implantátumok

whiteSKY

Tissue Line		L 8 mm	L 10 mm	L 12 mm	L 14 mm
	3.5	wSKYT3508 <input type="checkbox"/>	wSKYT3510 <input type="checkbox"/>	wSKYT3512 <input type="checkbox"/>	wSKYT3514 <input type="checkbox"/>
	4.0	wSKYT4008 <input type="checkbox"/>	wSKYT4010 <input type="checkbox"/>	wSKYT4012 <input type="checkbox"/>	wSKYT4014 <input type="checkbox"/>
	4.5	wSKYT4508 <input type="checkbox"/>	wSKYT4510 <input type="checkbox"/>	wSKYT4512 <input type="checkbox"/>	wSKYT4514 <input type="checkbox"/>

whiteSKY


Alveo Line		L 8 mm	L 10 mm	L 12 mm	L 14 mm
	3.5	wSKYA3508 <input type="checkbox"/>	wSKYA3510 <input type="checkbox"/>	wSKYA3512 <input type="checkbox"/>	wSKYA3514 <input type="checkbox"/>
	4.0	wSKYA4008 <input type="checkbox"/>	wSKYA4010 <input type="checkbox"/>	wSKYA4012 <input type="checkbox"/>	wSKYA4014 <input type="checkbox"/>
	4.5	wSKYA4508 <input type="checkbox"/>	wSKYA4510 <input type="checkbox"/>	wSKYA4512 <input type="checkbox"/>	wSKYA4514 <input type="checkbox"/>

whiteSKY protetikai komponensek


Mintázókupakok




Laboranalóg

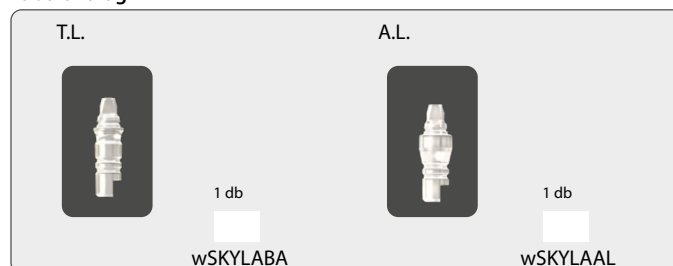


Protetikai sapkák

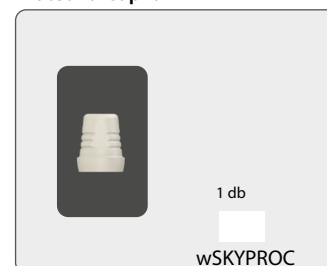

whiteSKY Alveo Line - Crestal fúró

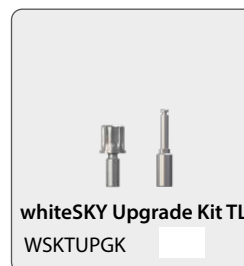

white
SKY

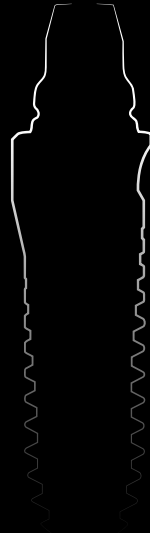

DENTAL INNOVATIONS
SINCE 1974

breident
group

Nyíri Zoltán · egészségügyi terméktanácsadó · T: +36 203641589 · @: zoltan.nyiri@breident.com · Vaslaki Krisztián · egészségügyi terméktanácsadó · T: +36 302226392 · @: krisztian.vaslaki@breident.com
breident Group Magyarország Kft · Táborhegyi út 9 · HU 1037 Budapest · T: +3616031543 · www.breident-medical.com · INFORMACIO.MAGYARORSZAG@BREIDENT-GROUP.COM



0091084HU-20240318 A tévedés és a változtatás jogát fenntartjuk!