
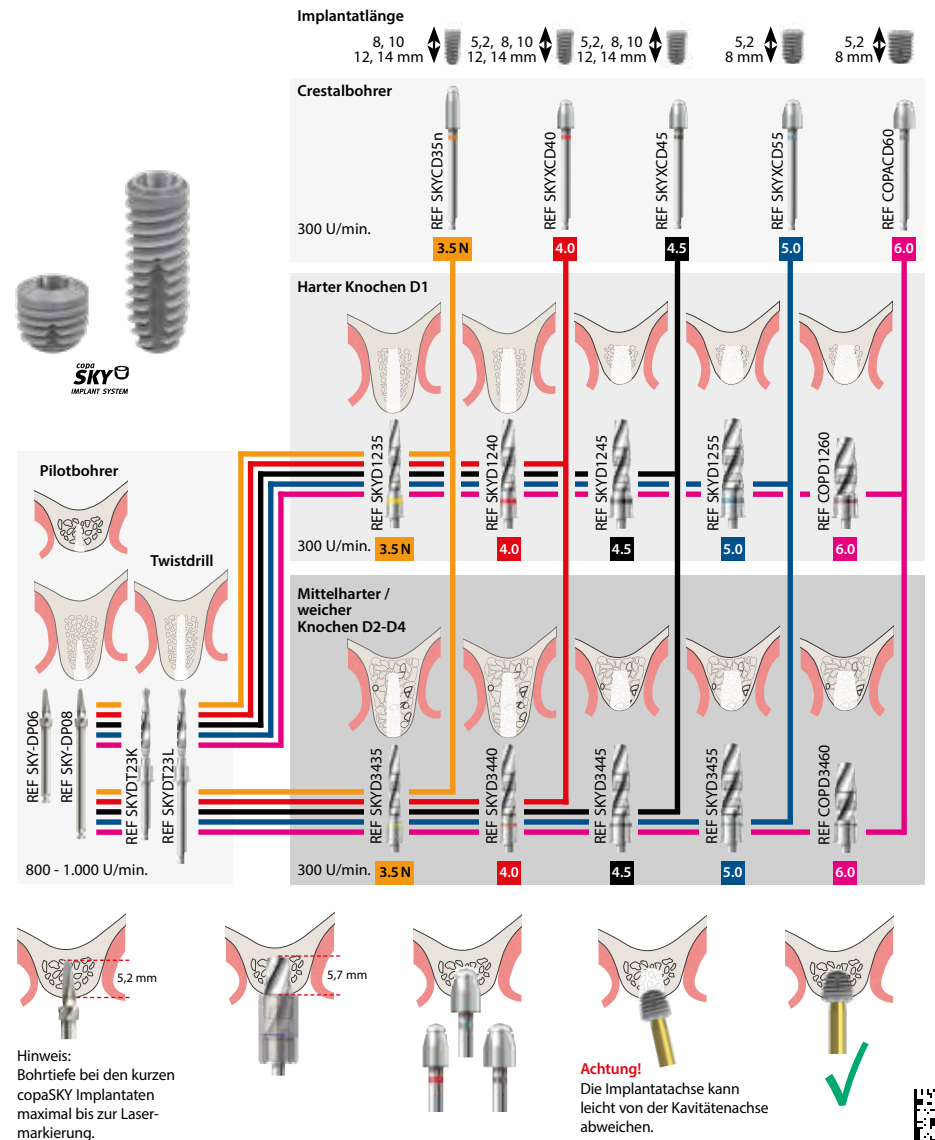


# Chirurgisches Protokoll für copaSKY Ø 3.0

# Chirurgisches Protokoll für <sup>copa</sup>SKY

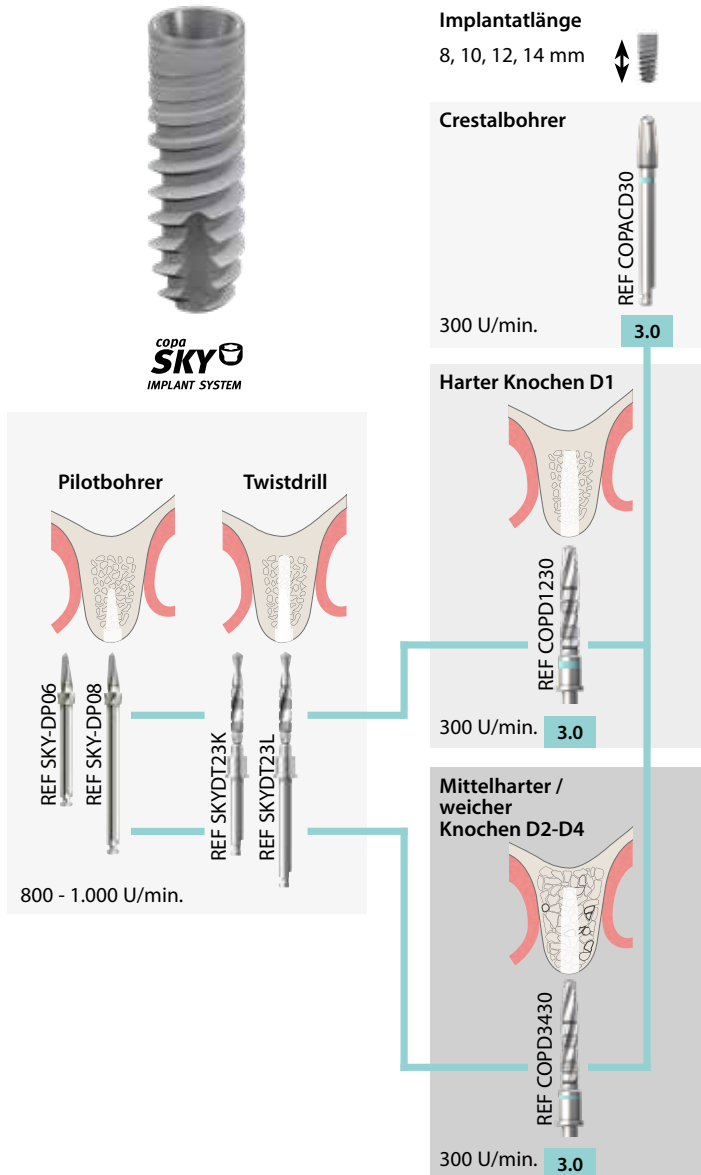


Irrtum und Änderungen vorbehalten

0098290D-20240614



# Chirurgisches Protokoll für **narrow SKY** **blue SKY** **classic SKY** **white SKY**

- optimiertes knochenqualitätsorientiertes Instrumentarium und chirurgisches Protokoll für die optimale Primärstabilität
- Bohrer mit abnehmbaren Bohrerstopps
- Reduzierung der Bohrerzahl erhöht die Übersichtlichkeit und Sicherheit während der OP

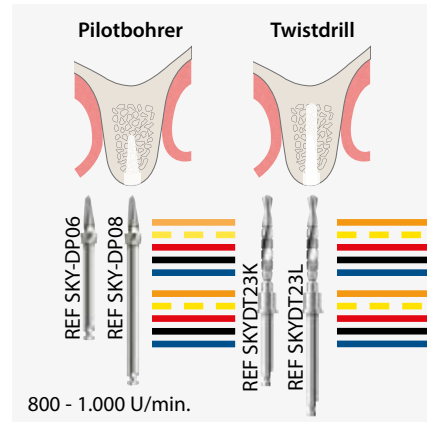


## Implantatlänge




## Crestalbohrer



## Harter Knochen D1

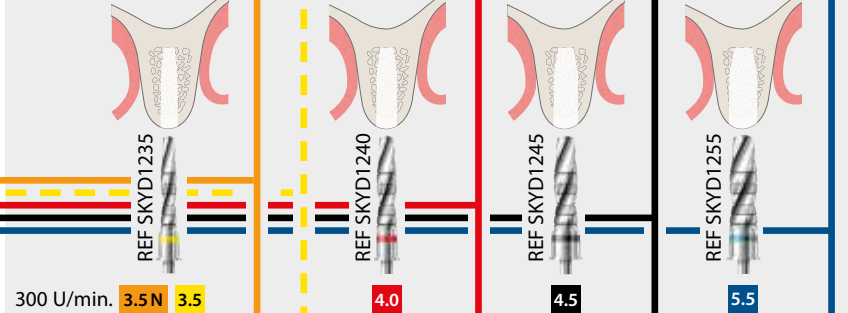

## Mittelharter / weicher Knochen D2-D4

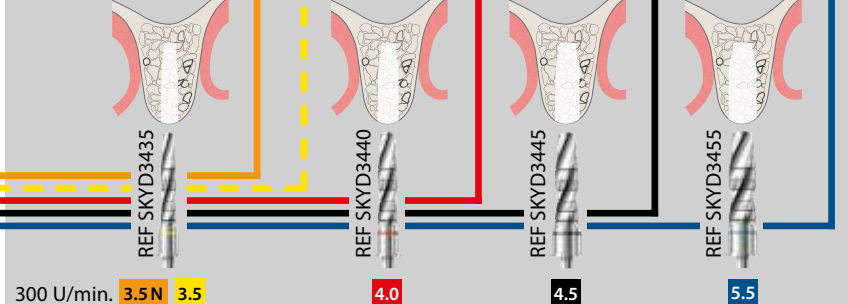


Bei den blueSKY und SKY classic Implantaten mit dem Durchmesser 3.5 wird der Crestalbohrer nur bis zur Lasermarkierung versenkt.

Bei den Implantaten

- narrowSKY
- blueSKY 4.0 bis 5.5
- SKY classic 4.0 bis 4.5

wird der Crestalbohrer komplett versenkt.

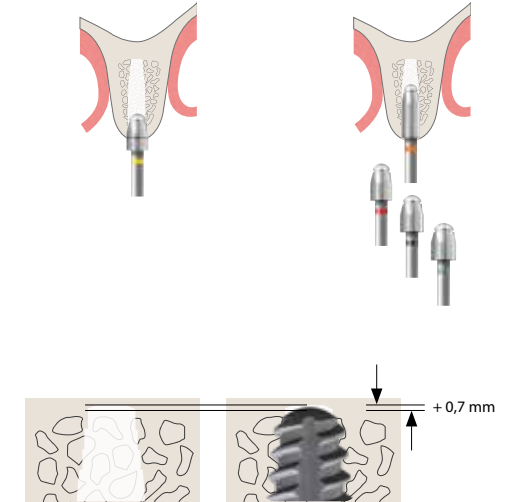

## Abnehmbare Bohrerstopps

