

Willkommen zu Ihrem neuen bredent medical Zahnimplantat!

Wobei Ihnen dieser Guide hilft:

 **Informationen zu Zahnimplantaten**
Eigenschaften und Risiken

 **Tipps zur Mundhygiene**
Wissenschaftlich fundiert

 **Empfehlung von Pflegeprodukten**
Klinisch getestet für Zahnimplantate

Wieso dieser Guide sinnvoll ist:

Zahnimplantate haben **erhöhte Entzündungsrisiken**

43%

von Implantatträgern
entwickeln Mukositis ¹

22%

von Implantatträgern
entwickeln Periimplantitis ¹

Aufgrund einer eingeschränkten immunologischen Barriere sind Zahnimplantate anfälliger für Entzündungen. Eine unbehandelte Entzündung des Zahnfleischs (Mukositis) kann sich zu einer Entzündung des Zahnhalteapparates (Periimplantitis) ausbreiten. Diese ist irreversibel und kann bis zum Verlust des Implantats führen.



Gesundes Implantat



Mukositis



Periimplantitis



bredent medical, eine Tochtergesellschaft der bredent group, ist ein renommierter deutscher Implantathersteller. Das Unternehmen entwickelt seit mehr als zwei Jahrzehnten Behandlungskonzepte im Bereich der Implantatprothetik. Die SKY Implantate von bredent medical sind in Deutschland hergestellt, qualitätsgeprüft und eine sichere Wahl für Zahnarzt und Patient.

Die bredent group entwickelt und produziert seit 50 Jahren individuelle Produkte, umfassende Systemlösungen und innovative Behandlungskonzepte in Deutschland. Das oberste Ziel besteht darin, die Lebensqualität und Lebensfreude von Patienten uneingeschränkt wiederherzustellen.

00912350D_20250514



bredent
group

IMPROIC®



Hygiene Guide

für Ihr neues Zahnimplantat


Wissenschaftlich fundiert

¹ Derks J, Tomasi C. Peri-implant health and disease. A systematic review of current epidemiology. J Clin Periodontol. (2015)

Wie beugt man Entzündungen effektiv vor?

Das primäre Ziel aller Maßnahmen zur Mundhygiene:

Entfernen von bakterieller Plaque

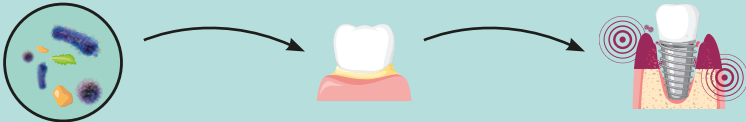

Plaque ist ein farblos bis weißlicher Biofilm, der primär aus Bakterien, deren Stoffwechselprodukten und Nahrungsresten besteht

Wird Plaque nicht regelmäßig entfernt, führt sie zur Bildung von Zahnstein

Zahnstein reizt häufig das Zahnfleisch und kann unbehandelt zu Entzündungen führen

Wie entfernt man bakterielle Plaque effektiv?

Schritt 1: Die Technik



Wie häufig Zähne putzen? Es ist zu empfehlen, zwei Mal pro Tag zu putzen: Einmal in der Früh & einmal am Abend, um Plaque regelmäßig zu entfernen.



Welche Zahnbürste?

Sowohl elektrische, als auch manuelle Handzahnbürsten sind zur Entfernung von Plaque geeignet.

Empfehlung

Weiche Borsten, da härtere Borsten das Zahnfleisch reizen und den Zahnschmelz beschädigen können. (Mikroschäden)

Bass-Technik (modifiziert) empfohlen



Zahnbürste im 45°-Winkel am Zahnfleisch ansetzen. Ohne Druck kreisen bzw. rüttelnde Bewegungen ausführen



Anschließend vom Zahnfleisch Richtung Zahnkrone „auswischen“, um Bakterien vom Zahnfleischrand zu entfernen

Reinigung Zahnzwischenräume



Interdentalbürsten (IDB)
Passende Größe beachten



Zahnseide
Ungewachst für bessere Reinigung



Munddusche
Kein Ersatz für Zahnseide und IDBs



Wie entfernt man bakterielle Plaque effektiv?

Schritt 2: Das richtige Pflegeprodukt

Was für optimale Pflegeprodukte wichtig ist



Remineralisierung
des Zahnschmelzes



Passender
Abrasionswert (RDA)



Verwendung von
Zuckeraustauschstoffen



Ausreichend
Schaumbildung



Antibakterieller
Schutz



Aktive Unterstützung
für Wundheilung



IMPROIC®

Zahnpflegeprodukte

Klinisch getestet

- ✓ Fluorid zur Remineralisierung von Zahnschmelz
- ✓ Geringer, balancierter RDA-Wert
- ✓ Xylitol als Zuckeraustauschstoff
- ✓ Extra starke Schaumbildung
- ✓ Extra starke antibakterielle Inhaltsstoffe
- ✓ Pantothenol zur Unterstützung der Wundheilung

bredent medical Zahnimplantate optimal
mit IMPROIC® pflegen. Jetzt testen!

www.improic.com

Ein neues Lebensgefühl

Kein Verstecken mehr – ungezwungenes Miteinander im Familien- und Freundeskreis. Strahlen Sie wieder in Ihrem sozialen Umfeld und auf dem Arbeitsplatz mit festsitzenden, gesunden Zähnen.

- ✓ Mehr Selbstbewusstsein und dauerhafte Verbesserung der Lebensqualität
- ✓ Sicherheit durch die qualitative Hochwertigkeit unserer in Deutschland hergestellten Implantate
- ✓ Erfüllung von hohen ästhetischen Erwartungen
- ✓ Verbesserte Kauphysiologie – Sie verfügen über Ihre natürliche Beweglichkeit der Kieferknochen bis ins hohe Alter

