

whiteSKY Alveo Line & Tissue Line

Használati utasítások



whiteSKY T.L. sebészeti protokoll



Implantátumhosszak

Crestal fúró

300 ford./perc

Kemény csont D1


300 ford./perc

Közepesen kemény / puha csont D2-D4



300 ford./perc

Írányított előkészítés

Az implantátumágyp előkészítése a whiteSKY T.L. implantátumoknál úgyszintén irányítottan végezhető. Az implantátum behelyezése ezután szabad kézzel történik.

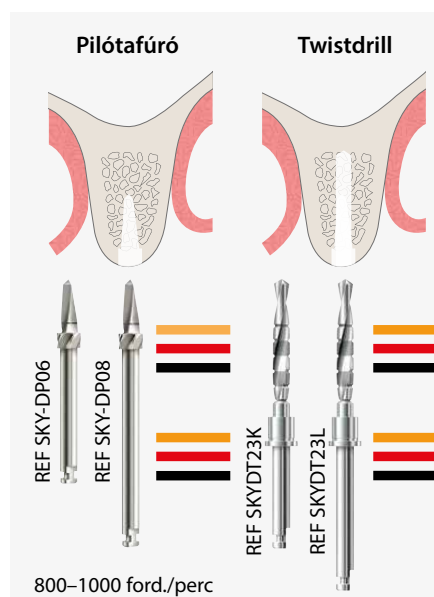

TISSUE LINE

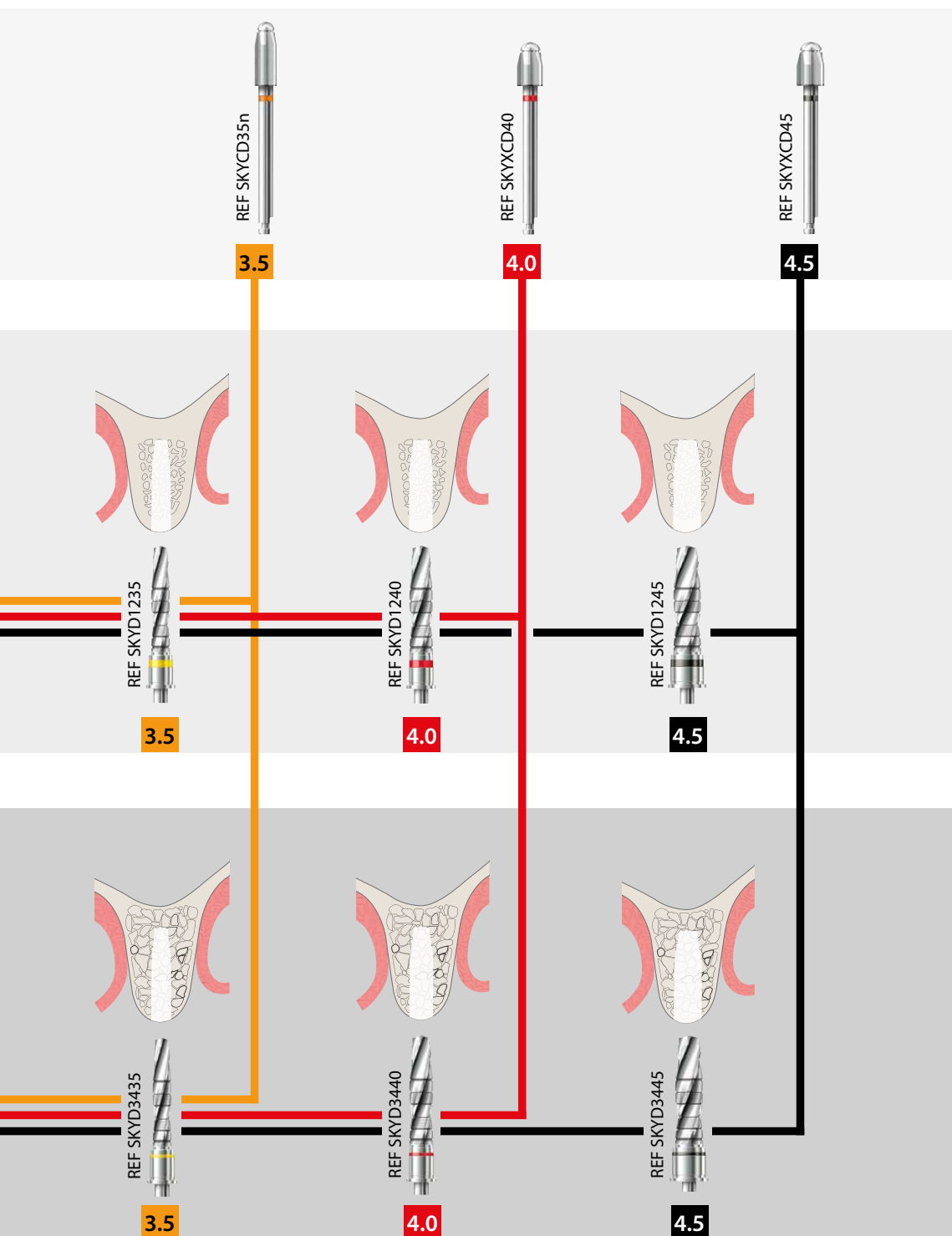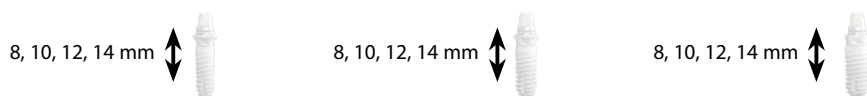

whiteSKY A.L. sebészeti protokoll



Részlegesen irányított előkészítés


Az implantátumágy előkészítése egészen a végfúróig irányítottan végezhető.

- A whiteSKY A.L. A Crestal fúrók szabad kézzel használhatók.
- Az implantátum behelyezése ezután szabad kézzel történik.

Kérjük, ProGuide használata esetén

vegye figyelembe a következőket:

- A Crestal fúrószárak nem illeszkednek a fúróhüvelyekbe.

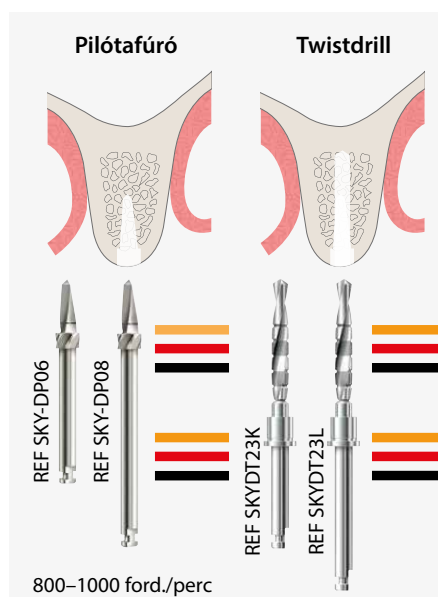

Implantátumhosszak

Crestal fúró

300 ford./perc

Kemény csont D1

300 ford./perc


Közepesen kemény / puha csont D2-D4

300 ford./perc









8, 10, 12, 14 mm

8, 10, 12, 14 mm

8, 10, 12, 14 mm

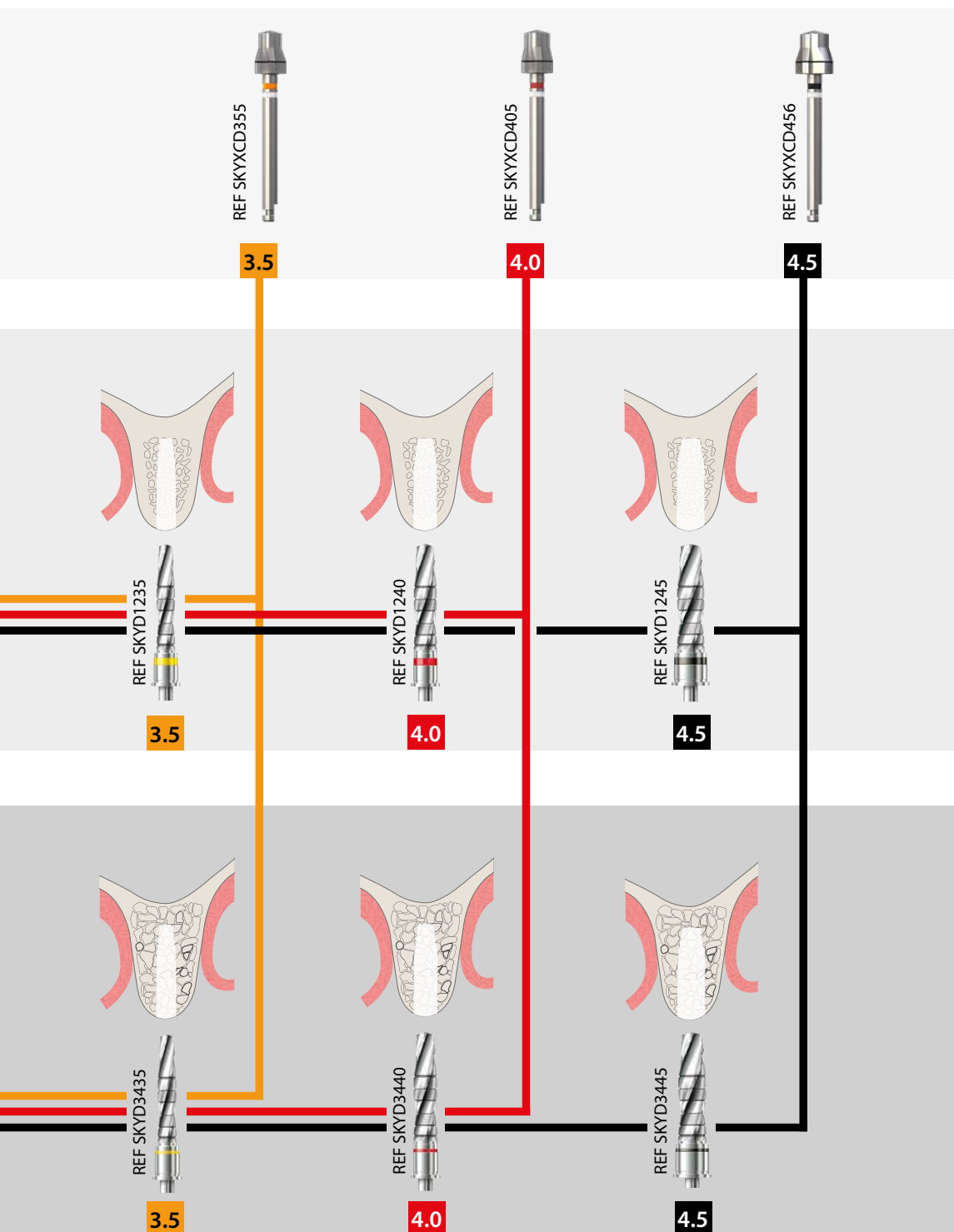

Azonnali beültetés – whiteSKY T.L.

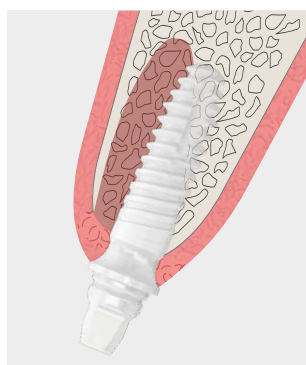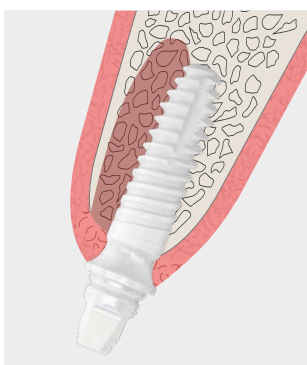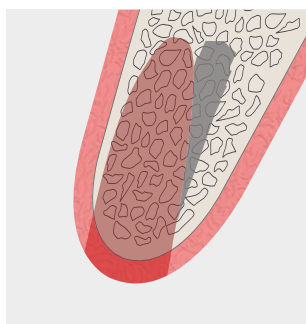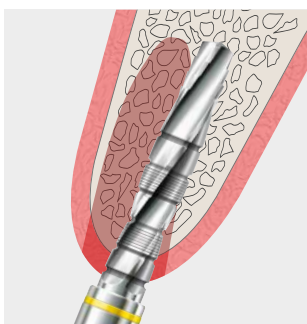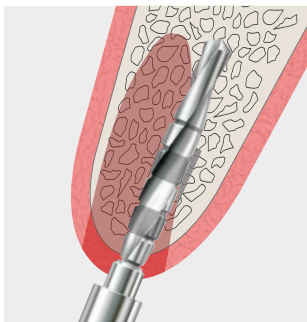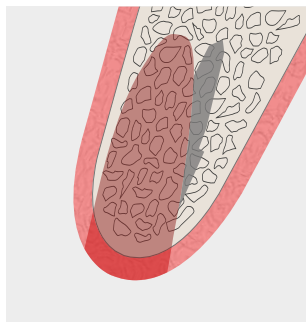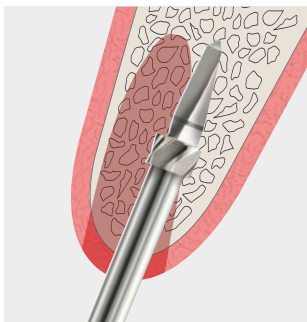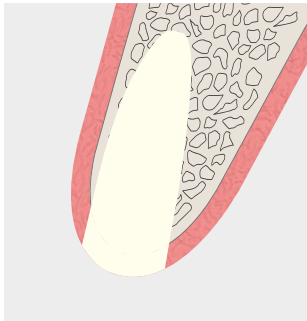

- Óvatosan távolítsa el a foggyökereket anélkül, hogy a vestibularis csontlemezek megsérüljenek.
- A fog kihúzása után gondosan távolítsa el a granulációs szövetet, és Helbo aPDT-vel fertőtlenítsa az üreget.

- Az implantátum tengelyiránya eltér a fogmedrek tengelyirányától.
- A pilótafúró hegyes végével módosítható a kiigazítás.

- A twistdrill segítségével az új tengely a végleges mélységig meghosszabbítható.

- A végfúró megnöveli az üreg átmérőjét a csont minőségének megfelelően.
- A whiteSKY T.L. esetén az utolsó végfúróval az előkészítés befejeződött.



MEGJEGYZÉS:

Bizonyos esetekben előkészítés szükséges a hozzá tartozó Crestal fúrók segítségével.



- A whiteSKY Tissue Line esetén azonnali beültetésnél a Crestal fúróra nincs szükség. Az implantátumot be kell csavarni a hátsó domborulatig a csontba.

A whiteSKY Tissue Line-nal késői beültetés is lehetséges.



Azonnali beültetés – whiteSKY A.L.

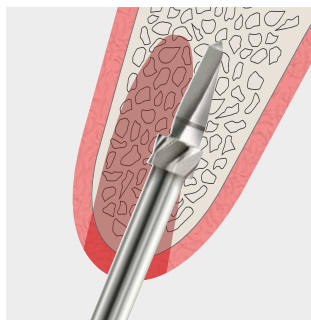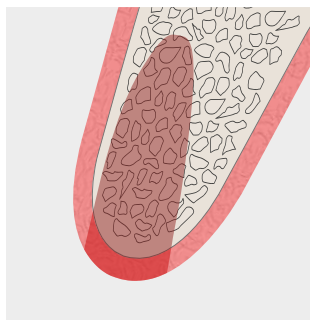



- Az üreg előkészítése a pilótafúró segítségével történik.

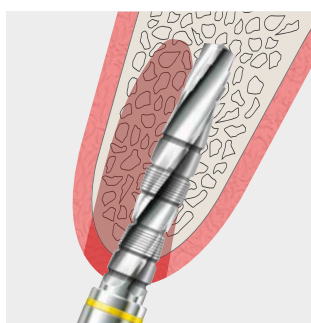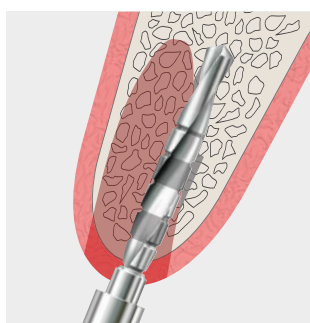

- Ezután a twistdrill és a végfúró segítségével fúrjuk ki a végső átmérőt.

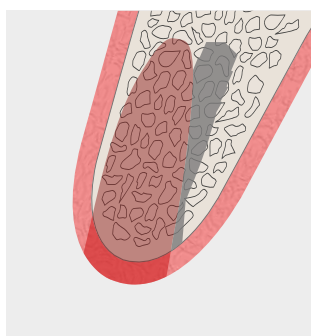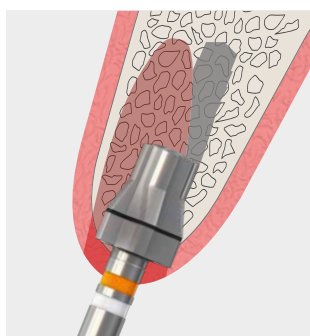


- A whiteSKY Alveo Line Crestal fúróval készítjük elő a keresztális régiót.

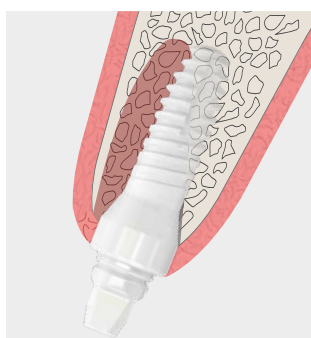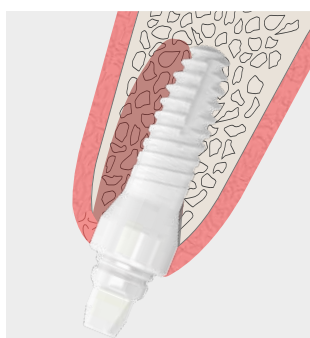

- Az implantátum behelyezésekor, a csontelhalás megelőzéséhez ügyelni kell arra, hogy a kúp alakú keresztális rész ne érjen a csonthoz.

A whiteSKY Alveo Line-nal késői beültetés is lehetséges.

Ideiglenes ellátás

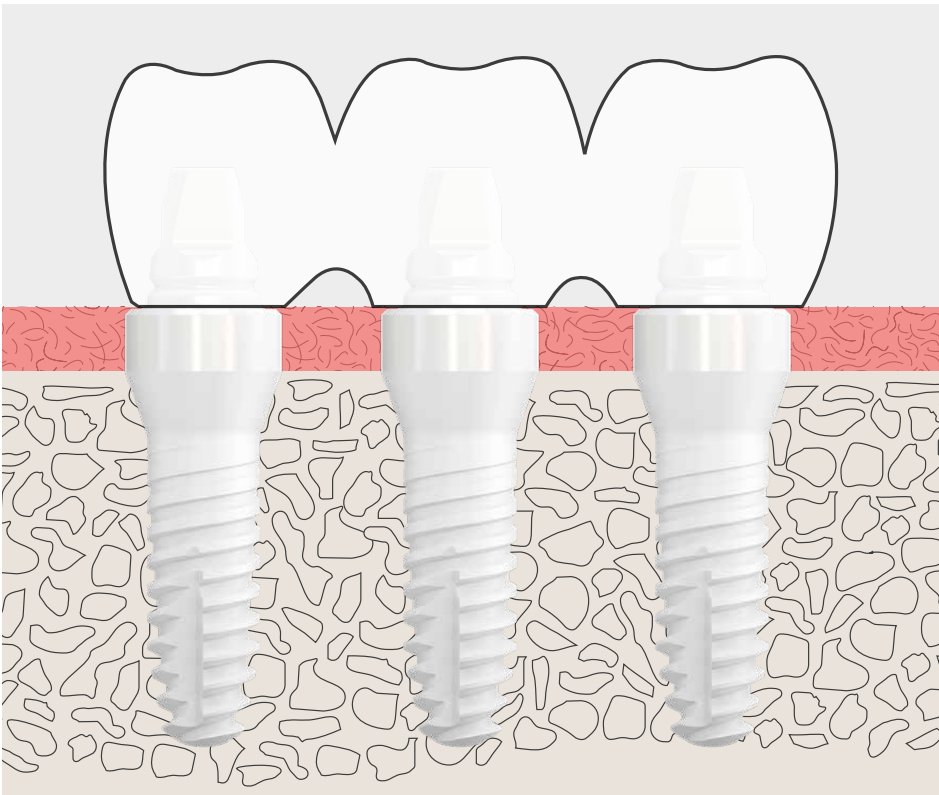


Ideiglenes ellátás

azonnali ellátás esetén:

- A laterotróziós érintkezések elkerülése
- A funkcionális okkluzális terhelés kizárása
- A több implantátumnak mindig blokkolnia kell egymást
- Szükség esetén stabilizálás műanyag blokkolással a szomszédos fogakkal savas maratási technológiával
- Ne húzza a provizóriumot az implantátum váll fölé.

Visszahívás/Utólagos ellenőrzés

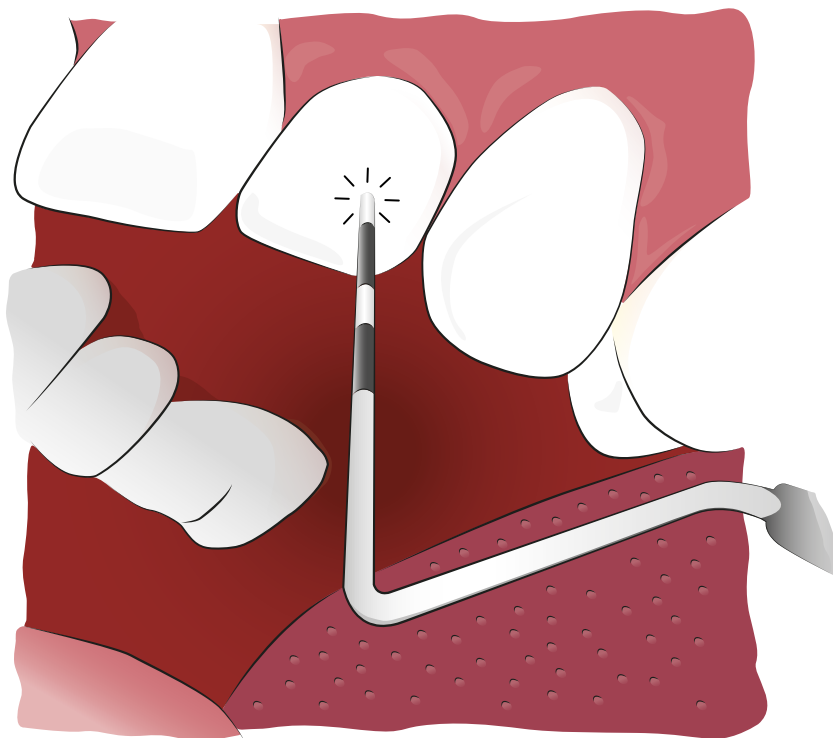

Utókezelés:

- Ellenőrzés kopogásvizsgálattal fémszondával egy hét eltelte után
- Ha megszűnt a blokkolás, rögzítse újra
- Tompa kopogó hang esetén hosszabbítsa meg a gyógyulási időt, ha szükséges, csavarja mélyebbre az implantátumot

**whiteSKY Tissue Line**

- Személyre szabás csak a megjelölt pontoknál
- A megmunkáláshoz használjon piros (finom) gyémántcsiszolót
- Csak könyökidommal (5:1), hűtéssel

**whiteSKY Alveo Line**

- Személyre szabás csak a megjelölt pontoknál végezhető
- A megmunkáláshoz használjon piros (finom) gyémántcsiszolót
- Csak hűtéssel könyökidommal (5:1)

FONTOS:

- Személyre szabás után analógok nem használhatók
- A CAD-könyvtár nem használható

A szelektív piaci bevezetés kérdései

Szkennelhető a whiteSKY A.L.?

Igen, a whiteSKY implantátumok közvetlenül szkennelhetők, függetlenül attól, hogy azok személyre szabottak vagy sem.

FIGYELEM:

Személyre szabott implantátumok esetén a Könyvtár nem használható! Ebben az esetben az implantátumokat úgy kell használni, mint egy természetes fogat.

Létezik a whiteSKY A.L. számára kiegészítő készlet?

Igen. Ez a kiegészítő készlet tartalmazza a whiteSKY behajtóeszközöket és a Crestal fúrókat. Ha az ügyfél mindkét whiteSKY implantátum termékvonalat szeretné használni, akkor szüksége van a whiteSKY T.L + A.L. bővítőkészletre is.

Az implantátumot csak kézzel lehet becsavarni?

Nem, géppel is becsavarhatja.

FONTOS:

A behajtónak alul fel kell feküdnie a platformra. Becsavaráskor további oldaleroőket nem szabad alkalmazni.

Hogyan lesz a protézis cementezve cirkónium implantátumok esetén?

Ideiglenes ellátás esetén Temp-Bond-dal. Végleges ellátás esetén gyantacementtel (pl. DTK). Cirkónium implantátumok esetén alkalmazható üvegionomer cement.

A whiteSKY A.L. esetében speciális Crestal fúróra van szükség?

Igen A whiteSKY Alveo Line kidomborodó formája miatt speciális Crestal fúrók szükségesek, úgy az azonnali, mind a késői beültetésnél.

Miért nem lehet az implantátumot a behajtóeszközzel kivenni a csomagolásból?

Mivel az implantátumon nincsenek kúpos felületek, nem szorítható be a behajtóeszközbe. Ezért a kivételt a műanyag tartóval kell végezni. Így az implantátum a végleges rögzítésig becsavarható. Ha az implantátum szilárdan és stabilan rögzül, a műanyag tartó könnyen lehúzható.

Lehet az implantátumot csiszolni?

Igen, a whiteSKY A.L. széles implantátumvállával egyénileg ideálisan hozzáigazítható a fogínyhez. Ez is a lényeges különbség a Tissue Line-val szemben, hogy ezen a területen a személyre szabás nem lehetséges.

Implantátumok

whiteSKY

Tissue Line		L 8 mm	L 10 mm	L 12 mm	L 14 mm
	3.5	wSKYT3508 ☐	wSKYT3510 ☐	wSKYT3512 ☐	wSKYT3514 ☐
	4.0	wSKYT4008 ☐	wSKYT4010 ☐	wSKYT4012 ☐	wSKYT4014 ☐
	4.5	wSKYT4508 ☐	wSKYT4510 ☐	wSKYT4512 ☐	wSKYT4514 ☐

whiteSKY


Alveo Line		L 8 mm	L 10 mm	L 12 mm	L 14 mm
	3.5	wSKYA3508 ☐	wSKYA3510 ☐	wSKYA3512 ☐	wSKYA3514 ☐
	4.0	wSKYA4008 ☐	wSKYA4010 ☐	wSKYA4012 ☐	wSKYA4014 ☐
	4.5	wSKYA4508 ☐	wSKYA4510 ☐	wSKYA4512 ☐	wSKYA4514 ☐

whiteSKY protetikai komponensek

Mintázókupakok





Laboranalóg

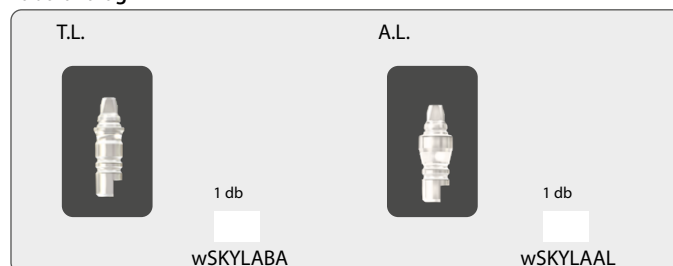

Protetikai sapkák



whiteSKY Alveo Line - Crestal fúró

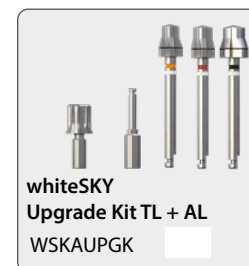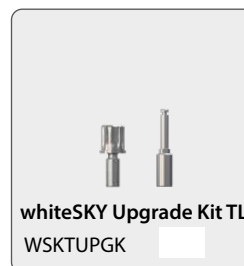

w h i t e SKY



0091084HU-20240318 A tévedés és a változtatás jogát fenntartjuk!



bredent
medical

bredent
group